

A-cerumen preparat do higieny uszu, płyn, 5 amp. po 2 ml

Cena: 14,27 zł



Opis słownikowy

Postać	Ampułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

A-cerumen jest zalecany dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy życia oraz osób dorosłych:

- Stosowany regularnie, pomaga w usuwaniu złożeń woskowiny oraz zapobiega ponownemu gromadzeniu woskowiny.
- Rozpuszcza również korki woskowinowe.

Jak działa A-cerumen?

A-cerumen nawilża i rozpuszcza korki woskowinowe (suchy, ubity wosk). Po usunięciu korka wosk podlega naturalnemu wydzieleniu w celu ochrony i nawilżenia ucha.

Skład:

Łagodne substancje powierzchniowo czynne (sodu acylosarkozynian i ester sacharozy), substancja nawilżająca, barwnik pochodzenia roślinnego, substancje pomocnicze q.s. 100%. Formuła bez konserwantów z barwnikiem pochodzenia naturalnego.

Dostępne opakowanie

Opakowanie zawierające 5 x 2 ml dawek. Jednodawkowe opakowanie pozwala na łatwe i bezpieczne użycie produktu.

Dawkowanie:

- Do regularnego stosowania (2 razy w tygodniu).
- W przypadku nagromadzenia złożeń (3 do 4 kolejnych dni, rano i wieczorem).

Instrukcja używania:

1. Głowę należy odchylić w kierunku przeciwnym w stosunku do ucha, które jest zakraplane.
2. Zaaplikować połowę objętości ampułki do ucha.

3. Masować nasadę ucha.

4. Wyprostować głowę umożliwiając wypłynięcie produktu z woskowiną, następnie przepłukać* oraz wytrzeć nadmiar roztworu.

*Przepłukać roztworem soli fizjologicznej lub czystej wody.

Ostrzeżenia:

Po otwarciu ampułkę należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Nie zamrażać.

Przechowywać z dala od światła.

Przechowywać w temperaturze 10-40°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu jednodawkowym.

Nie stosować uszkodzonych ampułek.

Środki ostrożności:

Aby uniknąć podrażnienia, nie należy wprowadzać końcówki ampułki zbyt głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego. Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji uszu lub gdy pacjent ma założony drenaż. W przypadku bólesności ucha, zasięgnąć porady lekarza. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dystrybutor:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o