

A-Cerumen, spray, 40 ml

Cena: 24,53 zł



Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLENMARK DISTRIBUTORS
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

A-cerumen jest łagodnym środkiem przeznaczonym do higieny uszu.
A-cerumen jest zalecany dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy życia oraz osób dorosłych:
Stosowany regularnie, pomaga w usuwaniu złożeń woskowiny oraz zapobiega ponownemu gromadzeniu woskowiny.
Rozpuszcza również korki woskowinowe.
Opakowanie zawierające 5x 2ml. Jednodawkowe opakowanie pozwala na łatwe i bezpieczne użycie produktu.

Działanie:

A-cerumen nawilża i rozpuszcza korki woskowinowe (suchy, ubity wosk). Po usunięciu korka wosk podlega naturalnemu wydzieleniu w celu ochrony i nawilżenia ucha.

Skład:

Łagodne substancje powierzchniowo czynne (sodu acylosarkozynian i ester sacharozy), substancja nawilżająca, barwnik pochodzenia roślinnego, substancje pomocnicze q.s. 100%. Formuła bez konserwantów z barwnikiem pochodzenia naturalnego.

Postać:

Opakowanie zawierające 5 x 2 ml dawek. Jednodawkowe opakowanie pozwala na łatwe i bezpieczne użycie produktu.

Dawkowanie:

- Do regularnego stosowania (2 razy w tygodniu).
- W przypadku nagromadzenia złożeń (3 do 4 kolejnych dni, rano i wieczorem).

Instrukcja użycia:

1. Głowę należy odchylić w kierunku przeciwnym w stosunku do ucha, które jest zakraplane.
 2. Zaaplikować połowę objętości ampułki do ucha.
 3. Masować nasadę ucha.
 4. Wyprostować głowę umożliwiając wypłynięcie produktu z woskowiną, następnie przepłukać* oraz wytrzeć nadmiar roztworu.
- *Przepłukać roztworem soli fizjologicznej lub czystej wody.

Ostrzeżenia:

- Po otwarciu ampułkę należy zużyć w ciągu 24 godzin.
Nie zamrażać.
Przechowywać z dala od światła.
Przechowywać w temperaturze 10-40°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu jednodawkowym.
Nie stosować uszkodzonych ampułek.

Środki ostrożności:

- Aby uniknąć podrażnienia, nie należy wprowadzać końcówki ampułki zbyt głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego. Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji uszu lub gdy pacjent ma założony drenaż. W przypadku bólesności ucha, zasięgnąć porady lekarza. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

Dystrybutor: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o