

Acerin plastry na odciski, plaster, 6 szt.



Cena: 8,79 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Opis

Plastry na odciski z centralnym dyskiem wykonanym z pianki polietylenowej. Działają wygładzająco i ochronnie. Zmiękczają skórę, dzięki czemu zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka. Dodatkowo piankowy dysk zabezpiecza odcisk przed tarcieniem i uciskiem. Kleje topliwe z siatką UV-C, opracowane w najnowocześniejszej technologii. Nie zawiera rozpuszczalników. Optymalne działanie w każdych warunkach środowiskowych.

Testowane dermatologicznie. Hipoalergiczne. Nie zawiera PCV.

Wymiary: 72 x 19 mm

Osobno pakowane.

Cechy

wspomagają leczenie nagniotków (odcisków)
działają wygładzająco
zmniejszają ucisk
przynoszą ulgę

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Przed zastosowaniem należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczony obszar, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie i

działanie plastra. Zdjąć zabezpieczenie ochronne i umieścić plaster tak, aby odcisk znalazł się centralnie pod nim. Codziennie zmieniać plaster na nowy. Tylko do użytku zewnętrznego.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA: Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować w przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie. Pacjenci z cukrzycą i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci do 16 roku życia przed zastosowaniem plastrów powinni skonsultować się z lekarzem. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera 35-40 % kwasu salicylowego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy powiadomić wytwórcę i właściwe władze.

Producent

Eurosirel S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 - Cusago (MI)
Italy

Dystrybutor

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
www.acerin.pl