

Akutel Stop spray, Opatrunek elastyczny w aerozolu, 60 ml

Cena: 19,32 zł



Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i przeznaczenie:

Akutel Stop spray przeznaczony jest do opatrywania drobnych ran powierzchniowych skóry. Składnik aktywny – mieszanka 80% alginatu wapnia i 20% alginatu sodu - tworzy nad raną mechaniczną warstwę proszku. Warstwa alginatu absorbuje ze zranionego miejsca krew i powstające wysięki, tworząc równocześnie chłodzący hydrożel, wspomagający proces gojenia. Wyciągi z rumianku pospolitego i nagietka lekarskiego dezynfekują ranę i działają przeciwzapalnie.

Olej z rokitnika, aloe vera i wosk z jojoby wspomagają naturalne nawilżenie zranionego miejsca i przyspieszają proces gojenia.

Sposób użycia:

Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Pojemnik trzymać pionowo dnem do dołu. Preparat nanosić poprzez rozpylenie na dezynfekowane miejsce z odległości 15-20 cm od powierzchni ciała. Preparat stosować w ilości odpowiadającej wielkości rany tak, aby nie spływał z opatrywanego miejsca. Rozpylenie przez 2 sekundy pomaga nanieść około 1 g preparatu, co wystarcza na opatrzenie około 5 cm² rany. W razie konieczności można zabieg powtórzyć po wcześniejszym delikatnym oczyszczeniu zranionego miejsca. W celu utrwalenia powstałego hydrożelu zastosować Akutel spray opatrunek elastyczny.

Skład:

Methylene dimethyletherum 54,1 g, Dimethyletherum 30,0 g, Calcium alginate 11,2 g, Natrium alginate 2,8 g, Jojoba esters 0,5 g, Hippophae rhamnoides oil 0,5 g, Aloe vera 0,3 g, Calendula officinalis 0,3 g, Matricaria recutita 0,3 g, Menthol 0,3g.

