

Apap Ice Chłodzący Plaster Hydrożelowy, 2 plast.

Cena: 9,23 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Chłodzący plaster hydrożelowy rekomendowany przez APAP
2 chłodzące plastry żelowe
8 godzin kojącego chłodu.

Natychniastowa, bezpieczna i chłodząca ulga w:

- bólach głowy
- migrenach

Produkt nieleczniczy, bezpieczny podczas stosowania z lekami.

Plaster jednorazowy przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Wskazania:

Natychniastowa, bezpieczna, chłodząca ulga w bólach głowy i migrenach. Plaster nie jest przeznaczony do obniżania temperatury ciała.

Działanie:

Chłodzący plaster hydrożelowy zawierający mentol – po przyklejeniu do skóry natychmiast chłodzi, przynosząc ulgę w bólach głowy i migrenach. Należy go stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować plastra u osób, które mają lub miały reakcje alergiczne na leki lub

kosmetyki.

Czas działania:

do 8 godzin.

Wskazany dla:

Osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Składniki:

Hydrożelowy plaster, zawiera mentol.

Sposób przechowywania:

Produkt przechowywać w zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym miejscu (w temp. min. 3°C i maks. 30°C), unikając bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w zamrażarce.

Sposób użycia:

Przeciąć lub rozerwać saszetkę w celu jej otwarcia i wyjąć jeden plaster żelowy. Usunąć przezroczystą folię z tylnej części plastra żelowego i wyrzucić ją. Umieścić jeden plaster żelowy na czole lub na tylnej części szyi. W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniej wielkości, używając nożyczek. Aby zapobiec wyschnięciu, nieużyty plaster żelowy przechowywać w saszetce z folii, zaginając jej górną część. Plaster hydrożelowy do jednorazowego stosowania.

Środki ostrożności:

Stosować zgodnie z instrukcją. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Jeśli objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza. Działania niepożądane lub reakcje alergiczne są mało prawdopodobne. Jeśli takie działania wystąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli wystąpi nadmierne zaczerwienienie, podrażnienie, uczucie palenia lub dyskomfortu skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie i poradzić się lekarza. Plaster hydrożelowy nie przyklei się do mokrej skóry, włosów lub ubrania. Nie należy przyklejać plastra na uszkodzona, podrażniona, poparzona lub bardzo wrażliwą skórę.

Z uwagi na ryzyko uduszenia lub zakrztuszenia: Osoby, które nie mogą samodzielnie usunąć plastra lub osoby niepełnosprawne, nie powinny stosować produktu bez nadzoru. Plaster nie powinien być naklejany na nos oraz na usta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław