


Apap Thermal plaster rozgrzewający, 1 plast.

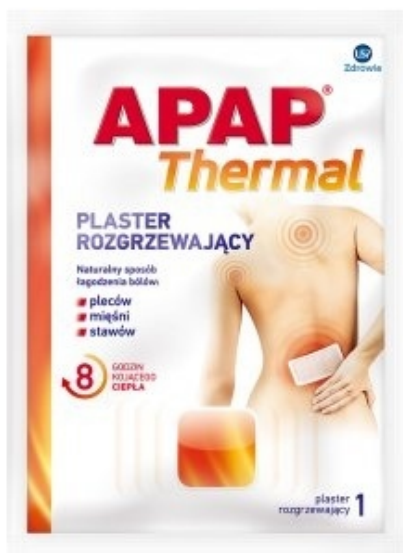

Cena: 9,23 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki higieniczne

Opis produktu

APAP Thermal

Plaster rozgrzewający rekomendowany przez APAP

Wyrób medyczny

8 godzin kojącego ciepła

Naturalny sposób łagodzenia bólów:

§ Ból pleców

§ Bóle mięśni

§ Bóle stawów

Wskazania: Plaster rozgrzewający, przynosi ulgę w bólach pleców, mięśni i stawów. W skuteczny i naturalny sposób rozluźnia mięśnie.

Działanie: Efekt rozgrzewający trwa do 8 godzin. Plaster do jednorazowego zastosowania, przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy go stosować bezpośrednio na skórę.

Przeznaczony dla: osób dorosłych i dzieci powyżej 13. roku życia.

Sposób użycia: Otwórz saszetkę, przerywając ją wzdłuż linii nacięcia (nie przecinaj). Usuń folię zabezpieczającą ze spodniej części plastra rozgrzewającego i przyklej w bolącym miejscu na czystą i suchą skórę. Plaster stopniowo wydziela ciepło, osiągając maksymalną temperaturę po około 30 minutach. Aktywuje się on przez kontakt z powietrzem - otwórz saszetkę bezpośrednio przed naklejeniem plastra.

Skład: sproszkowane żelazo, węgiel aktywny, woda i inne.

Sposób przechowywania: Plaster należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt; w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (min. 3°C, max. 30°C). Powinien zostać zużyty przed końcem okresu ważności podanym na saszetce.

Środki ostrożności: NIEPRAWIDŁOWO UŻYTY PLASTER, NAWET NIE W PEŁNI ROZGRZANY, MOŻE POWODOWAĆ POPARZENIE. Należy przestrzegać instrukcji stosowania i często obserwować działanie plastra. Aby zapobiec ryzyku wystąpienia oparzeń: musisz umożliwić przepływ powietrza wokół plastra. Nie uciskaj go, na przykład kładąc się lub siadając na nim czy też nakładając obcisłe ubrania. Jeśli plaster stanie się nieprzyjemnie gorący lub pojawi się wysypka, natychmiast zaniechaj jego używania. Jeśli po 7 dniach ból nie minie, bądź się nasili, przerwij stosowanie plastra i skonsultuj się z lekarzem, ponieważ ból może być objawem poważniejszej dolegliwości. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie usunąć plastra, np. w podeszłym wieku lub niepełnosprawne, powinny stosować plaster pod nadzorem. Plaster nie jest przeznaczony do leczenia bólu menstruacyjnego oraz dolegliwości bólowych towarzyszących zespołowi jelita drażliwego. Nie wolno stosować plastra na obszarze ciała innym niż ramiona i plecy.

Ryzyko poparzeń jest większe w przypadku delikatnej lub starzejącej się skóry. Kobiety w ciąży, a także osoby z zaburzeniami krążenia lub chorobami serca, cukrzycą, uszkodzeniami nerwów lub zaburzeniami czucia, chorobami skóry lub reumatoidalnym zapaleniem stawów, powinny skonsultować użycie plastra z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania: Zabronione jest stosowanie plastra u dzieci do 12. roku życia, używanie go w czasie snu, przez okres dłuższy niż 8 godzin w ciągu doby. Nie należy naklejać plastra w okolicy, w której występuje zaczerwienienie lub stan zapalny oraz na uszkodzoną/zasinioną lub podrażnioną skórę. Plastra nie powinny stosować osoby, u których w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na leki lub kosmetyki. Nie należy stosować plastra w miejscach na ciele pozbawionych odczuwania ciepła. Niewskazane jest używanie go wraz z kremami, środkami do nacierania lub płynami do

stosowania na skórę, a także w pobliżu innych źródeł ciepła. Nie powinny go stosować osoby obłożnie chore lub u których występuje skłonność do powstawania owrzodzeń skóry. Nie należy spalać plastra. Nie należy zgniatać plastra - nagrzej się on samodzielnie w ciągu kilku minut. Nie wolno wkładać go do kuchenki mikrofalowej lub próbować ponownie rozgrzać zużyty plaster. Nie należy go moczyć w wodzie lub innych płynach.

Zwróć uwagę: Plaster służy do jednorazowego użytku i jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Po jego usunięciu może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry. Jeśli po kilku godzinach nadal się ono utrzymuje, należy zaprzestać stosowania plastrów rozgrzewających, dopóki zaczerwienienie całkowicie nie ustąpi. **Składniki plastra rozgrzewającego mogą być szkodliwe, jeśli zostaną połknięte bądź zetkną się bezpośrednio ze skórą lub oczami:** W przypadku połknięcia należy przepłukać usta wodą. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast opłukać te okolice wodą. W obu przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Usuwanie odpadów: Plaster należy wyrzucać do domowych pojemników na odpady.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław