

Aquamer Hipertonic Aerozol do nosa, 50 ml



Cena: 21,36 zł

Opis słownikowy

| | |
|--|--------------------------------|
| Postać | Aerozol |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Aquamer hipertonic aerozol do nosa jest hipertonicznym roztworem charakteryzującym się wysoką zawartością soli morskiej. Roztwór hipertoniczny zawiera więcej soli niż w płynach fizjologicznych człowieka. Roztwór po aplikacji na opuchniętą błonę śluzową nosa, aktywnie oczyszcza ją, co powoduje szybkie zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa i ułatwia oddychanie. Aquamer hipertonic jest przeznaczony na katar u niemowląt, katar u dzieci i dorosłych z upośledzoną normalną fizjologiczną funkcją śluzówki nosa. Aquamer hipertonic szybko łagodzi objawy zatkanego nosa i zatok, bez żadnych ograniczeń czasu stosowania, ponieważ nie uszkadza śluzówki jamy nosowej i nie wywołuje przyzwyczajenia.

Skład Aquamer Hipertonic

1 ml aerozolu zawiera: 37mg soli morskiej z Morza martwego, wodę oczyszczoną oraz chlorek benzalkoniowy - środek konserwujący, który zabezpiecza wyrób przed zanieczyszczeniem.

Zastosowanie:

- Niemowlęta i dzieci poniżej drugiego roku życia: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. Dorośli i dzieci powyżej drugiego roku życia: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczający pierścień z plastikowego zamknięcia atomizera. Trzymaj w pozycji pionowej. Zdejmij kapturek zabezpieczający i naciśnij pompkę kilka razy, aż pojawi się pierwsze rozpylenie. Wprowadź końcówkę aplikatora do jamy nosowej i naciśnij mechanizm. W tym samym czasie trzymaj butelkę w pozycji pionowej i nie cofaj końcówki. W czasie rozpylenia oddychaj delikatnie przez nos. Po użyciu przepłukaj końcówkę czystą wodą. Załóż kapturek zabezpieczający.
- Katar u niemowlaka
- Katar u dziecka
- Katar u alergika

Przeciwwskazania

Uczulenie na składniki preparatu.

Ważne wskazówki

Nie połykaj. Dzieci nie powinny używać produktu bez nadzoru dorosłych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Producent

Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k, ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.