

Aquamer Isotonic Aerozol do nosa, 50 ml



Cena: 20,46 zł

Opis słownikowy

Postać	Aerozol
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Aquamer Isotonic aerozol do nosa jest izotonicznym roztworem soli morskiej. Aquamer Isotonic spray do nosa jest przeznaczony dla osób zaburzoną prawidłową fizjologiczną funkcją śluzówki nosa, jak również do codziennej pielęgnacji jamy nosowej. Aquamer Isotonic nawilża, przywraca naturalną zdolność do samooczyszczenia nosa i prawidłową produkcję śluzu, który chroni przed przesuszeniem i mechanicznym podrażnieniem (dym, kurz i inne). Usprawnia przepływ powietrza w górnych drogach oddechowych. Regularne przepłukiwanie jamy nosowej kilka razy dziennie, zmniejsza ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Skład
Sól Morska Woda morską
9mg / 1ml 50 ml

Skład Aquamer Isotonic

1 ml aerozolu zawiera 9 mg soli morskiej z Morza Martwego, wodę oczyszczoną; dla większego bezpieczeństwa mikrobiologicznego zastosowano środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który zabezpiecza wyrób przed zanieczyszczeniem.

Zastosowanie:

Niemowlęta i dzieci poniżej drugiego roku życia: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. Dorośli i dzieci powyżej drugiego roku życia: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczający pierścień z plastikowego zamknięcia atomizera. Trzymaj w pozycji pionowej. Zdejmij kapturek zabezpieczający i naciśnij pompkę kilka razy, aż pojawi się pierwsze rozpylenie. Wprowadź końcówkę aplikatora do jamy nosowej i naciśnij mechanizm. W tym samym czasie trzymaj butelkę w pozycji pionowej i nie cofaj końcówki. W czasie rozpylenia oddychaj delikatnie przez nos. Po użyciu przepłukaj końcówkę czystą wodą. Załóż kapturek zabezpieczający

- Katar u niemowlaka
- Katar u dziecka

- Katar u alergika

Przeciwwskazania

Alergia na którykolwiek ze składników.

Nie połykaj. Dzieci nie powinny używać produktu bez nadzoru dorosłych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Producent

Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k, ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.