

Argenton Optic spray na powieki, 10 ml

Cena: 26,95 zł



Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Mechanizm działania:

Argenton optic wspomaga naturalną barierę ochronną oka, zabezpieczając powierzchnię gałki ocznej przed wysychaniem. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów łagodząc objawy zapalenia. Dzięki zawartości witamin A, E oraz D-panthenolu Argenton optic wykazuje działanie odżywcze i nawilżające.

Skład:

Lecytyna sojowa, chlorek sodu, witamina E, witamina A (palmitynian witaminy A), sorbitol, D-panthenol, woda oczyszczona, nanokoloid srebra.

Interakcje:

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane:

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

Zastosowanie:

Wspomagająco przy:

- stanach zapalnych;
- suchości oka.

Wskazania:

Argenton optic wspomaga leczenie stanów zapalnych oraz zapewnia prawidłowe nawilżenie oka.

Preparat łagodzi objawy dyskomfortu oczu, przynosząc ulgę suchym, podrażnionym i piekącym oczom, zwłaszcza w przypadku:

- zapalenia spojówek;
- infekcji bakteryjnych i wirusowych;
- długotrwałej pracy przy komputerze;
- przebywania w pomieszczeniach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem;
- niekorzystnych warunków środowiska (zanieczyszczone i zapyłone powietrze);
- używania soczewek kontaktowych;
- długotrwałego wyężania wzroku (np. prowadzenie samochodu);
- przebywania w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem.

Środki ostrożności:

Nie należy rozpylać preparatu na otwarte oko.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.

Sposób użycia:

- Stosować na zamknięte powieki.
- Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.
- Skierować wylot dozownika w kierunku oka, następnie rozpylić 1-2 razy zachowując odległość ok. 10 cm od zamkniętej powieki. Aplikację powtarzać 3-4 razy dziennie lub w zależności od własnych potrzeb.
- W celu oczyszczenia brzegów powiek z zalegającej wydzieliny, po aplikacji preparatu powiekę przetrzeć najlepiej jałowym gazikiem. Nie należy rozpylać produktu na otwarte oko.
- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Preparat może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
- W przypadku stosowania preparatu na makijaż zaleca się aplikację na powiekę z odległości ok. 15-20 cm.

Dodatkowe informacje

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku stosowania preparatu zgodnie z instrukcją użycia nie występuje ryzyko zanieczyszczenia, jedno opakowanie może być stosowane przez kilka osób. Produkt należy zużyć do 6 miesięcy od pierwszego otwarcia. Nie używać po upływie terminu ważności.

Postać preparatu:

Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o poj. 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska