

Aspirator Marimer, aspirator, 1 szt.

Cena: 27,39 zł



Opis słownikowy

| | |
|--|-------------------------------------|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

POSTAĆ: Aspirator do nosa dla dzieci.

W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ ASPIRATOR DO NOSA DLA DZIECI?

Do 6 miesięcy życia dzieci oddychają wyłącznie przez nos i nie umieją go jeszcze

wydmuchać, z tego względu ważne jest, aby nos u niemowlaka był całkowicie drożny. Wydzielina, która zalega w nosie, utrudnia dziecku oddychanie, odżywianie oraz sen. Stosując aspirator do nosa, można pomóc dziecku w oczyszczaniu nosa z zalegającej wydzieliny. Podczas snu lub karmienia, dziecko będzie mogło znowu swobodnie oddychać.

INSTRUKCJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Po wyjęciu z opakowania, aspirator do nosa dla dzieci należy dokładnie przemyć

ciepłą wodą z mydłem i przepłukać czystą wodą.

- Końcówkę należy wysterylizować w niskiej lub wysokiej temperaturze.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie aspiratora do użycia

1. Umyć ręce
2. Złożyć poszczególne części produktu Marimer aspirator do nosa dla dzieci

zgodnie z rysunkiem.

3. Pomiędzy końcówkę a zbiornik umieścić niewielką ilość waty bawełnianej, która działa jak filtr higieniczny.

1. Końcówka do nosa
2. Wata bawełniana – nie dołączona od opakowania
3. Zbiornik
4. Łącznik od wężyka
5. Wężyk
6. Ustnik

PRZYGOTOWANIE DZIECKA

- Ułożyć dziecko w pozycji leżącej na przewijaku, podtrzymując jego głowę.
- Umieścić ustnik w swojej jamie ustnej. Niewielki wystający brzeg krawędzi ustnika

ułatwia jego trzymanie pomiędzy zębami.

- Umieścić końcówkę aspiratora w otworze nosowym dziecka.
- Delikatnie wciągnąć powietrze przez ustnik. Wydzielina zgromadzi się w zbiorniku.
- W razie potrzeby czynność powtórzyć.
- Powtórzyć czynności do drugiego otworu nosowego.

Wkroplenie do nosa soli fizjologicznej lub roztworu izotonicznej soli morskiej Marimer Soft ułatwi usunięcie wydzieliny.

INSTRUKCJA PO KAŻDYM UŻYCIU

• Po każdym użyciu, poszczególne części aspiratora do nosa dla dzieci należy rozmontować i dokładnie przemyć ciepłą wodą z mydłem i przepłukać czystą wodą.

• Ze względów higienicznych, przed każdym użyciem, należy wysterylizować końcówkę w zimnej wodzie lub nad parą.

OSTRZEŻENIA

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że aspirator do nosa dla dzieci i końcówka są nieuszkodzone.

Jeśli zauważy się pierwsze oznaki zużycia lub uszkodzenia, należy wymienić aspirator do nosa dla dzieci i (lub) końcówkę.

Nie umieszczać we wrzącej wodzie.

**P R Z E C H O W Y W A Ć W M I E J S C U
NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.**

Dystrybutor: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o