

Aspirator Sopelek 2 do nosa aparat + 10 filtrów, 1 op.



Cena: 16,61 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
--	--------------------------------

Przechowywanie	Temperatura pokojowa
----------------	----------------------

Rejestracja	Wyrób medyczny
-------------	----------------

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Właściwości:

Produkt do codziennej higieny noska niemowlaka.

Umożliwia usunięcie wydzieliny z noska dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania.

Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc).

Sposób użycia:

Jednorazową końcówkę do nosa nakładamy na zakończony ustnikiem cylinder główny aspiratora. Wsuwamy końcówkę do jednego otworu nosowego niemowlaka i delikatnie, powoli, z jednakową siłą wciągamy powietrze przez ustnik.

Tą samą czynność powtarzamy w drugim otworze nosowym. Następnie zdejmujemy zanieczyszczoną końcówkę aspiratora oraz wyjmujemy i wyrzucamy zanieczyszczony filtr.

Jeżeli oddychanie niemowlaka jest bardzo utrudnione, można wkropić uprzednio do każdej dziurki w nosie 3-4 krople roztworu izotonicznego.

Przed każdorazowym stosowaniem, w celu utrzymania maksymalnej higieny, należy aspirator odkażać poprzez krótkotrwałe działanie gorącej wody (ok. 90 st. C, max. 15 sekund).