

Blend-a-dent complete Fresh klej do protez extra silny, 47g

Cena: 17,32 zł



Opis słownikowy

Postać	klej
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PROCTER
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Charakterystyka:

Blend-a-dent Extra Strong Fresh to super klej do protez całkowitych i częściowych. Zapewnia pewne i trwałe umocowanie protezy przez cały dzień, jednocześnie zwiększając komfort noszenia dzięki warstwie amortyzującej między dziąsłami a protezą. Klej ma przyjemny świeży miętowy smak i został opracowany z myślą o kompleksowym działaniu i ochronie. Pomaga zapobiegać przedostawaniu się resztek pokarmu pod protezę. Jego mocne trzymanie zapewnia pewność i pewność noszenia protezy.

Skład:

Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, CI 14720, Aroma, menthol, CI 16185, Limonene.

Stosowanie:

Przed założeniem protezy należy dokładnie wyczyścić protezę i dziąsła. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy nałożyć krople kleju w odstępach wzdłuż krawędzi protezy oraz na powierzchniach, które będą miały kontakt z jamą ustną. Przed założeniem protezy, należy wypłukać jamę ustną wodą. Następnie mocno docisnąć protezę w odpowiednim miejscu i krótko przytrzymać. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się powstrzymanie się od jedzenia lub picia przez 15-30 minut.