

Bobo-test Test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Cena: 11,69 zł



Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Postać | Test |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | DIAGNOSIS S.A. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

BOBO-TEST płytkowy test ciążowy to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Test jest bardzo szybki, ponieważ wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.

BOBO-TEST płytkowy test ciążowy to łatwe w użyciu i dokładne narzędzie, które pozwala przeprowadzić kobietom podejrzewającym ciążę szybkie badanie diagnostyczne. Test pozwala sprawdzić stężenie hormonu hCG, który pojawia się w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu to 25 mIU/ml.

Do jego przeprowadzenia wystarczy próbka porannego moczu zebrana do suchego i czystego naczynia. W opakowaniu testu znajduje się płytkowy test ciążowy oraz pipetka, za pomocą której pobieramy z pojemnika 3 krople moczu, które następnie umieszczamy w okienku testowym płytki.

Pozytywny wynik, będący potwierdzeniem ciąży jest widoczny jako 2 paski. Jeśli na teście pojawi jeden pasek w strefie kontrolnej C, wynik jest negatywny i oznacza, że nie jesteśmy w ciąży. Brak prążków lub pojawienie się jednego prążka w strefie testowej T wskazuje na błąd i wynik nieważny. W takim przypadku należy powtórzyć badanie przy użyciu nowego testu ciążowego.

Przed przystąpieniem do badania należy koniecznie przeczytać załączoną do testu ulotkę informacyjną, aby prawidłowo wykonać analizę.

Kiedy wykonać test?

Bobo-test – płytkowy test ciążowy można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki, to do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

Jak działa test?

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu hCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak. Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność hCG już przy stężeniu 25 mIU/ml. Nie należy go interpretować po czasie dłuższym niż 10 minut.