

Canditon globulki dopochwowe, 10 glob. po 2 g

Cena: 25,61 zł



Opis słownikowy

Postać	Globulki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HEXANOVA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

CANDITON® globulki dopochwowe to wyrób medyczny, który jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pochwy, w tym o charakterze grzybiczym.

Pomaga zmniejszyć:

- Podrażnienia
- Świąd
- Uczucie pieczenia

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych

Zastosowanie:

CANDITON® globulki dopochwowe działa wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości o charakterze grzybiczym, którego głównymi składnikami są:

- kwas mlekowy
- polikarbofil
- kwas borny

Polikarbofil, poprzez oddziaływanie ze śluzem w pochwie, przyczynia się do obniżenia pH w pochwie, a także uwadnia środowisko pochwy, co sprzyja poprawie nawilżenia oraz zmniejszeniu świądu i uczucia pieczenia.

Globulki CANDITON® dzięki zawartości kwasu borney i kwasu mlekowego stwarzają kwasowe pH środowiska pochwy, zapobiegając adhezji i namnażaniu się patogenów.

Sposób dawkowania:

Stosować 1 globulkę na dobę.

Globulkę CANDITON® umieścić w pochwie, najlepiej wieczorem przed snem, stosować przez minimum 5 – 7 dni, po cyklu miesięczkowym lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Instrukcja stosowania:

- Umyć dokładnie ręce.
- Otworzyć opakowanie i po umyciu rąk, wyjąć jedną globulkę z blistra.
- Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko w pochwie, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, by uniknąć przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

- Stosowanie globulek w czasie ciąży, laktacji i u dzieci powinno być ograniczone wyłącznie do sytuacji, w których są bezwzględnie konieczne i odbywać się pod bezpośrednią kontrolą lekarza.
- W przypadku obecnej błony dziewiczej przed użyciem należy skonsultować się z ginekologiem w celu uzyskania informacji o warunkach stosowania.
- Wyrób do jednorazowego użytku.
- W razie przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy nie należy powtórnie jej stosować.

Skład: kwas borney, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferolu, palmitynian witaminy A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olejek z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy