

Canpol, osłonki piersi Easy Start 18/603, 2 szt.



Cena: 11,41 zł

Opis słownikowy

Postać	Osłonki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	CANPOL
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki higieniczne

Opis produktu

CANPOL BABIES silikonowe osłonki piersi M/L EasyStart*2

Osłonki na piersi wykonane z miękkiego i delikatnego silikonu umożliwiają bezbolesne karmienie. Doskonale chronią obolałe i popękane brodawki oraz przyspieszają gojenie ran. Górna nieco węższa krawędź osłonki sprawia, że dziecko jedząc, może przytulić się do piersi matki, poczuć zapach jej skóry i ciepło. Silikon nie posiada zapachu ani smaku, dlatego nie wpływa na smak pokarmu. Specjalnie etui do sterylizacji ułatwia higienę i utrzymanie osłonek w czystości. Umożliwia szybką, 2-minutową dezynfekcję w kuchenke mikrofalowej. W opakowaniu 2 sztuki.

Instrukcja sterylizacji w etui:

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem etui dokładnie umyj w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz.
2. Wlej 25 ml przegotowanej wody do podstawy.
WAŻNE: Dodanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję.
3. Włóż nakładki do etui.
4. Szczelnie nałóż pokrywkę.
5. Zamknięte etui umieść w kuchenke mikrofalowej.
6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000 W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

UWAGA!

Podczas pracy etui musi stać na równej powierzchni. Przed wyjęciem etui z mikrofalówki zawsze poczekaj co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i otwierania. Wylej pozostałą wodę z etui przez dedykowany otwór, opłucz ją i osusz. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące. Odczekaj 15 min przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

Zastosowanie: Produkt utrzymuj w czystości. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj osłonki delikatnym płynem i dokładnie wypłucz. Dezynfekuj je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty. Osłonki nie nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalach. Można je dezynfekować w gorącej wodzie i sterylizatorze.

Osłonkę nakładaj na suchą i czystą pierś. Nie stosuj żadnych kremów i wazelin. Nie dziurkuj ani nie powiększaj otworów osłonki, gdyż może to spowodować jej rozpad lub zniszczenie. Przed zastosowaniem produktu zalecamy konsultację z doradcą laktacyjnym lub położną.

Przed założeniem osłonki delikatnie pomasuj brodawkę, aby ją wyciągnąć. Następnie przyłóż osłonkę do piersi tak, aby sutek wypełniał otwór i dokładnie dociśnij ją do piersi. Upewnij się, że część wyprofilowana skierowana jest ku górze lub miejscu gdzie podczas karmienia znajduje się nosek dziecka. Delikatnie przytrzymując osłonkę możesz rozpocząć karmienie.

Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka. Czyste osłonki powinny być przechowywane w plastikowym pojemniku dołączonym do opakowania. Sprawdź je przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzuć.

Canpol Sp. z o. o.
ul. Puławska 430
02-884 Warszawa