

Cerumex preparat do higieny uszu, płyn, 15 ml

Cena: 16,07 zł



Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AXFARM SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania:

Cerumex polecany jest do rozmiękania i usuwania korków woszczynowych oraz zachowania higieny przewodu słuchowego zewnętrznego. Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

Właściwości:

Preparat doskonale penetruje do woszczyzny. Aktywny składnik preparatu w kontakcie z woszczyną powoduje jej rozmięczenie i rozluźnienie.

Ułatwia rozmiękanie twardych czopów woskoinowych.

Sposób użycia:

Ogrzać preparat do temperatury ciała. Przechylić głowę na bok. Wlać do jednego ucha od 5 do 10 kropli starając się by nie wydostały się na zewnątrz. Czubek buteleczki nie powinien być wkładany do przewodu słuchowego. Dla lepszego działania Cerumexu należy pozostać z przechyloną głową przez kilka minut lub włożyć do zakroplonego ucha kawałek watki, by zapobiec wypłynięciu kropli na zewnątrz.

Powtarzać zakraplanie 2 razy dziennie przez okres 4 dni. Resztki woszczyzny można wypłukać wodą pod prysznicem przy okazji mycia głowy wodą o temperaturze około 37°C. Nie wkładać do przewodu słuchowego żadnych patyczków z watą, długopisów, szpilek do włosów, zapalek i podobnych przedmiotów, które mogą uszkodzić przewód słuchowy. Zawartość opakowania zużyć w ciągu 1 miesiąca od otwarcia.

Składniki:

Aqua, Glycerin, Sodium Bicarbonate.