

# Compeed Dyskretny plaster leczniczy leczenie opryszczki, 15 szt.



Cena: 36,34 zł

## Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### Właściwości i zastosowanie:

Compeed Dyskretny plaster, leczenie opryszczki przyspiesza leczenie opryszczki i pozostaje na skórze do 12 godzin\* Zaczyna działać już od pierwszych oznak opryszczki wargowej i działa na wszystkich jej etapach, aby powstrzymać nasilenie się opryszczki. Compeed Dyskretny plaster leczniczy, leczenie opryszczki, tworzy tarczę antywirusową, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Jest niewidoczny, pomaga uniknąć poczucia zakłopotania. Leczy, chroni, ukrywa. Można nosić razem z maseczką.

\*w indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić

#### Dodatkowe informacje:

Wymiary: 1,5 x 1,5 cm

#### Sposób użycia:

##### Założenie plastra:

Dokładnie umyj i osusz ręce. W miejscu przyklejenia plastra nie należy nanosić kremów, gdyż może nie utrzymać się na tłustej skórze. Wyjając aplikator z plastrzem, odsłonić warstwę klejącą plastra poprzez pociągnięcie jednej części końcówki aplikatora. Nie dotykać części klejącej palcami. Delikatnie docisnąć plaster do miejsca wystąpienia opryszczki. Wolnym, płynnym ruchem odkleić drugi koniec aplikatora i docisnąć plaster do skóry. Wedle upodobań na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę. Plaster można nosić aż do momentu, w którym sam zacznie się odklejać.

Usuwanie plastra:

Jeżeli plaster utrzymuje się na skórze, nie ma potrzeby jego usuwania lub wymiany.

Kiedy plaster zaczyna się odklejać od skóry, należy go zastąpić nowym.

Jeżeli istnieje potrzeba usunięcia plastra, rozciągnij go delikatnie wzdłuż skóry, jednocześnie odklejając.

Nie używaj ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję i rozprzestrzenianie się wirusa).

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosować na zainfekowane rany.
- Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.
- W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się lub nie goi się, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nigdy nie przecinać plastrów Compeed.
- Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.

**Producent**

LABORATOIRE HRA PHARMA

**Dystrybutor**

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146D

02-305 Warszawa