

## Compeed Plastry na pęcherze Mix, 5 szt.



Cena: 26,48 zł

### Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

#### Opis:

#### **Zastosowanie:**

Wyrób medyczny Compeed Plastry na pęcherze mix rodzajów to kompleksowe rozwiązanie na pęcherze stóp, niezależnie od przyczyny ich wystąpienia (np. bieganie, nowe buty itp.). Produkt przynosi natychmiastową ulgę w bólu i wspomaga naturalne leczenie.

#### **Skład**

Plaster hydrokolidowy.

#### Zawartość opakowania

- Plaster średni - 2 szt.
- Plaster wąski - 2 szt.
- Plaster na palce stóp - 1 szt.

#### **Sposób działania:**

Plastry Compeed na pęcherze zmniejszają tacie i nacisk, dzięki czemu minimalizują uczucie bólu. Wilgotne środowisko tworzące się pod powierzchnią plastra przyspiesza naturalne procesy regeneracyjne. Ultraprzylepne krawędzie i wodoodporna powłoka umożliwiają noszenie plastra nawet przez kilka dni, a także chronią przed przedostaniem się drobnoustrojów.

#### **Sposób użycia:**

1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem.
2. Usuń warstwę papierową plastra, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.

3. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
4. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni).
5. W razie potrzeby zaaplikuj nowy plaster,

**Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającego ochronę naskórka.

Nie stosować na zainfekowane rany.

Nie używać ponownie - grozi to pojawieniem się infekcji.

Nie należy przecinać plastrów.

W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

**Producent**

LABORATOIRE HRA PHARMA

**Dystrybutor**

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146D

02-305 Warszawa