

Compeed Plastry na pęcherze średnie 4.2x6.8cm, 5 szt.



Cena: 24,18 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Compeed Plastry na pęcherze średnie, powstały w oparciu o technologię hydrokoloidową aktywnego żelu, który zawiera cząsteczki absorbujące wilgoć. Zapewnienie naturalnej wilgotności skóry przynosi natychmiastową ulgę w bólu od pęcherzy oraz szybkie gojenie się ran. Plastry Compeed działają jak druga skóra. Są dyskretne, ultraprzylepne, posiadają zwężające się krawędzie, dzięki czemu nie ograniczają ruchu i nie odklejają się. W porównaniu do zwykłych plastrów pozostają na miejscu przez kilka dni i 3x bardziej chronią przed otarciem.

Dodatkowe informacje:

Wymiary: 4,2 x 6,8 cm

Sposób użycia:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, że skóra wokół pęcherza nie jest tłusta od kremów i olejków. Usuń dolną, papierową warstwę, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, że brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na pęcherzu, aż do momentu kiedy sam zacznie się odklejać. Aby usunąć plaster: nie ciągnij go do góry, lecz powoli rozciągaj wzdłuż skóry.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosować na zainfekowane rany.
- Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.
- W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się lub nie goi się, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

- Nigdy nie przecinać plastrów COMPEED®.
- Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.