

## Compeed Plastry nawilżające na odciski średnie, 6 szt.



Cena: 26,48 zł

### Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

#### Opis:

#### **Właściwości i zastosowanie:**

Wyrób medyczny przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawaniu odcisków. Posiada grubą warstwę amortyzacyjną i ultraprzyklepne, wymodelowane brzegi. Dzięki swojej konstrukcji, pozostaje w miejscu aplikacji nawet przez kilka dni.

Opakowanie zawiera: 6 plastrów o wymiarach 1,7 x 5,7 cm.

#### **Przeznaczenie:**

Wyrób medyczny należy stosować do usuwania twardych i miękkich odcisków, a także w celu przeciwdziałania ich powstawaniu. Produkt jest elastyczny, oddychający i wodoodporny. Zawiera żel hydrokoloidowy, który pomaga nawilżyć i zmiękczyć skórę, co wspomaga szybką eliminację odcisków. Grubo wyścielana warstwa produktu wspiera amortyzację, redukcję nacisku z zewnątrz i w efekcie pomaga zapewnić natychmiastową ulgę w bólu. Ponadto wspomaga ochronę zmiany przed obcieraniem i wspiera wilgotne środowisko gojenia się rany.

#### **Sposób użycia:**

1. Skórę należy oczyścić i osuszyć.
2. Papierową warstwę produktu usunąć tak, aby nie dotykać warstwy samoprzylepnej.
3. Plaster zaaplikować na odcisk. Dysk nawilżający powinien znajdować się bezpośrednio nad nim.
4. Pozostawić plaster w miejscu aplikacji do czasu, aż sam zacznie się odklejać.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją użycia dołączoną do wyrobu.

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować na zainfekowane rany.

Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.

W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się lub nie goi się, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Nigdy nie przecinać plastrów Compeed.

Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.

**Producent**

LABORATOIRE HRA PHARMA

**Dystrybutor**

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146D

02-305 Warszawa