

Compeed Plastry odciski na palce 1.75x6.0cm, 10 szt.



Cena: 24,18 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Wyrób medyczny z aktywnym żelem hydrokoloidowym, przeznaczony do redukcji bólu, wywołanego naciskiem na odcisk i usuwania odcisków na palcach. Produkt jest wodoodporny oddychający i dopasowujące się do ruchów, dzięki czemu pozostaje na miejscu nawet przez kilka dni.

Opakowanie zawiera: 10 plasterów o wymiarach 1,75 x 6,0 cm.

Przeznaczenie:

Wyrób medyczny należy stosować w celu zmniejszenia nacisku, powodującym powstanie odcisku, a także eliminacji miękkich i twardych odcisków na palcach. Zawiera żel hydrokoloidowy, który wspiera amortyzację i ochronę odcisku przed obcieraniem. Równocześnie wspiera jego nawilżenie i zmiękczenie, co pomaga ułatwiać usunięcie zmiany.

Sposób użycia:

Miejsce aplikacji oczyścić i osuszyć.

Plaster przykleić w taki sposób, aby pokrywał cały odcisk i pozostawić do czasu, aż sam zacznie się odklejać.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją użycia dołączonej do wyrobu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosować na zainfekowane rany.

- Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.
- W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się lub nie goi się, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nigdy nie przecinać plastrów Compeed.
- Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.

Producent

LABORATOIRE HRA PHARMA

Dystrybutor

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa