

Conceive Plus Lubrykant wspomagający zapłodnienie, 8 wor. po 4 g



Cena: 111,84 zł

Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis produktu

Lubrykant wspomagający płodność CONCEIVE PLUS® to właściwy wybór, gdy jesteś gotowy na dziecko! Zaprojektowany dla wszystkich par, które starają się o dziecko.

Lubrykant CONCEIVE PLUS® jest przeznaczony dla wszystkich par, które zdecydowały się na dziecko, a także par, które próbowały zajść w ciążę przez jakiś czas. CONCEIVE PLUS® zwiększa szanse na zajście w ciążę w naturalny sposób, przez co utrzymuje ruchliwość i żywotność plemników, dzięki czemu mają one większe szanse na dotarcie i zapłodnienie komórki jajowej.

Z jonami niezbędnymi do zapłodnienia, CONCEIVE PLUS® jest właściwym wyborem, gdy jesteś gotowy na dziecko!

- **ZWIĘKSZONE PRAWDOPODOBIENSTWO ZAJŚCIA W CIAŻĘ:** Korzystanie z naszego lubrykantu może pomóc, zwiększając szanse na naturalną zajście w ciążę.
- **WSPARCIE ŻYWOTNOŚCI SPERMY:** Opatentowana formuła to lubrykant wspomagający,

żywołność i ruchliwość plemników. Jest to jedyny środek nawilżający zawierający wapń i magnez niezbędny w procesie zapłodnienia.

- **OPRACOWANY PRZEZ LEKARZY:** Lubrykant Conceive Plus jest przyjazny płodności i bezpieczny dla plemników, został opracowany przez lekarzy i zatwierdzony przez FDA. środek ten jest stosowany przez kliniki płodności i zalecany przez ekspertów wszystkim parom, które starają się o dziecko.
- **DLA WSZYSTKICH PAR, KTÓRE SĄ STARAJĄ SIĘ O DZIECKO:** Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz próbować, czy starasz się o dziecko przez jakiś czas, używanie Conceive Plus pomaga stworzyć środowisko przyjazne płodności, aby zwiększyć twoje szanse na naturalną ciążę.
- **IMITUJE NATURALNE PŁYNY CIAŁA:** osobisty środek nawilżający Conceive Plus zapewnia wsparcie funkcjonowania plemników. Izotoniczność i zbalansowane pH sprawiają, że sukcesywnie imituje naturalne płyny płodne podczas owulacji.

O CONCEIVE PLUS:

Spójrzmy prawdzie w oczy: jeśli cierpisz na jakąkolwiek suchość lub inne trudności, wiesz już, jak ważne jest posiadanie „właściwych warunków” do poczęcia – by ci „mali pływacy” mogli dotrzeć do celu. Conceive Plus to jedyny bezpieczny środek do płodności, który zawiera jony wapnia i magnezu. Jony te są niezbędne dla żywotności komórek i procesu zapłodnienia.

Unikalna formuła pomaga zwiększyć przyjemność i złagodzić negatywne skutki suchości pochwy. Sprawia, że proces „starania” będzie jeszcze bardziej przyjemny i ekscytujący dla Ciebie i Twojego partnera.

Czy wiesz, że jony wapnia i magnezu są kluczem do sukcesu? Te dwa składniki odżywcze pomagają utrzymać ruchliwość i żywotność plemników – dzięki czemu plemniki mają większe szanse na dotarcie i zapłodnienie komórki jajowej.

Conceive Plus dzięki izotoniczności i oraz zbalansowanym pH idealnie imituje naturalne płyny płodne podczas owulacji. Conceive Plus to zatwierdzony przez FDA lubrykant przyjazny płodności, który jest opracowany tak, aby był izotoniczny, spełniał zakres pH oraz był zgodny z przeżyciem i migracją plemników ludzkich.

KIEDY KORZYSTAĆ?

Używaj Conceive Plus w dni płodne za każdym razem, gdy uprawiasz seks ze swoim partnerem podczas próby zajścia w ciążę. Sugerujemy użycie zarówno tubki do aplikacji zewnętrznej (dla niego), jak i aplikatorów do stosowania dopochwowego 10-15 minut przed stosunkiem seksualnym.

Wyjmij aplikator z pudełka, nie używaj, jeśli nakładka z zabezpieczeniem jest uszkodzona. Przytrzymaj wąski koniec aplikatora do góry, odkręć zakładkę i wyrzuć. Delikatnie wsuń wąski koniec aplikatora głęboko do pochwy i ściśnij główkę 2-3 razy, aby umieścić Conceive Plus® w jamie pochwy.

Wyjąć, ściskając koniec tubki i wyrzucić. Każdy aplikator jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i nie może być przechowywany po otwarciu lub ponownie użyty. Może być stosowany 10-15 minut przed aktywnością seksualną, aby umożliwić rozproszenie nawilżenia w

pochwie. Każdy aplikator zawiera 4 gramy Conceive Plus®. Sugerujemy użycie tubki wielokrotnego użytku Conceive Plus®, jeśli wymagana jest dodatkowe nawilżenie lub użycie innego aplikatora. Żel w tubce Conceive Plus® może być używany w połączeniu z aplikatorami Conceive Plus® do aplikacji dopochwowej.

Conceive Plus® to lubrykant do stosowania na penisie i / lub pochwie, przeznaczony do nawilżania, aby zwiększyć łatwość i komfort intymnej aktywności seksualnej oraz uzupełnić naturalne nawilżanie organizmu. Conceive Plus® jest kompatybilny z plemnikami, oocytami, zarodkami i może być używany przez pary próbujące zajść w ciążę. Produkt może być stosowany w interwencjach dotyczących płodności w celu ułatwienia wprowadzania urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych do jamy pochwy. Conceive Plus® jest kompatybilny z prezerwatywami z naturalnego lateksu i poliuretanu. Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania z syntetycznymi prezerwatywami poliizoprenowymi.

Zalecany przez lekarzy, farmaceutów i kliniki płodności w ponad 60 krajach. Opublikowane badanie pokazuje bezpieczeństwo plemników.