

# Corega Max Mocowanie + Osłona Miętowy krem do protez, 40 g



Cena: 19,57 zł

## Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

COREGA MAX MOCOWANIE + OSŁONA MIĘTOWY  
krem do protez zębowych

**Skład:** Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, CI 73360, CI 15850

### Sposób użycia:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
  - a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy
  - b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
  - c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

### Uwagi do stosowania:

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony dla przedostających się drobinek jedzenia. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.

### OSTRZEŻENIA:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić

inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zamknąć zakrętką. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

**Działania niepożądane:**

Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności).

**Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu