

# Corega Max Osłona, krem, 40 g

Cena: 20,27 zł



## Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

COREGA Max Osłona zapewnia zaawansowaną osłonę blokującą przedostawanie się drobinek jedzenia pod powierzchnię protezy oraz mocując ją na cały dzień. Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu tworząc osłonę dookoła krawędzi protezy.

### Działania niepożądane:

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

### Sposób przechowywania:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Stosowanie:

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony przed przedostającymi się drobkami jedzenia. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.

### Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę umyć i wysuszyć.
2. Nanieść krem na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi, w sposób pokazany na rysunku w dołączonej ulotce.
  - Górna proteza - Nanosić długi ciągły pasek. Nanieść dwa krótsze paski na środku protezy.

- Dolna proteza - Nanosić długi ciągły pasek.
  - Proteza częściowa - Nanieść dwa krótsze paski.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
  4. Założyć protezę, dociskając ją i przygryźć na kilka sekund dla pewnego mocowania.

**Sposób usuwania:**

1. przepłukać jamę ustną wodą,
2. wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając,
3. usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki,
4. dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega Tabs lub pastę Corega 2w1 do mycia protez zębowych i zębów.

**Skład:**

Calcium/Sodium PVM/MA Co-polymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum.

**Uwagi:**

Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty.