

Corega Super Mocny krem Mocujący Neutralny Smak XL, 70 g

Cena: 25,56 zł



Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	STAFFORD
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Zastosowanie

krem mocujący do protez zębowych

Wskazanie i działanie

mocowanie protezy zębowej

Dawkowanie

raz dziennie

Sposób użycia:

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypluć jamę ustną.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygrzyźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Uwagi do stosowania

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

OSTRZEŻENIA:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentystry. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zamknąć zakrętką.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności).

Skład

Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna

Przechowywanie

w suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza

Producent

Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.