

Corega Tabs Bio Formula, tabletki rozpuszczalne, 136 tabl.

Cena: 40,28 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Tabletki Corega Tabs Bio Formula, dzięki formule czyszczącej „micro clean”, znacznie skuteczniej niszczą szkodliwe bakterie i grzyby znajdujące się na protezie niż zwykła pasta do zębów*.

- Zwykłe pasty do zębów mogą uszkodzić protezę zębową, ponieważ zarysowują jej powierzchnię. Zarysowania sprzyjają namnażaniu się bakterii. Tabletki Corega Tabs Bio Formula czyszczą protezę zębową bez zarysowań, dzięki czemu proteza pozostaje czysta, wolna od przebarwień oraz gładka.
- Jednocześnie niszczą 99,9% bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach
- Regularne stosowanie tabletek do czyszczenia protez zębowych Corega Tabs zapewnia specjalistyczne, dokładne oczyszczenie protezy, jak też świeżość każdego dnia

*podczas badań laboratoryjnych

Sposób użycia: wrzuc tabletkę do ciepłej (niegorącej) wody w ilości wystarczającej do całkowitego zanurzenia protezy zębowej. Protezę włóż do roztworu na około 15 minut. Proteza musi być całkowicie zanurzona. Po wyjęciu protezę wyszczotkować i wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór wylać. Zaleca się zdejmowanie protezy na noc.

Składniki: sodium bicarbonate, citric acid, potassium caroate (Potassium Monopersulfate), sodium carbonate, sodium carbonate peroxide, TEAD, sodium benzoate, PEG-180, sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, aroma, subtilisin, cellulose gum, CI 42090, CI 73015