


## CRP Test, 1 szt.

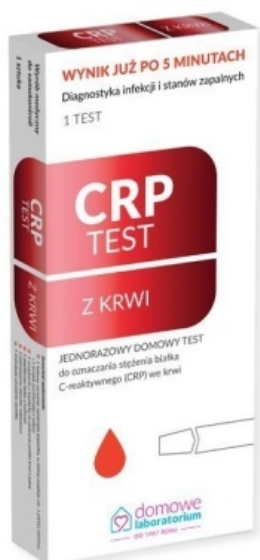

Cena: 40,31 zł

### Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Test do oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) we krwi

#### Opis produktu

**\*\*Na czym polega działanie testu CRP? \*\***

Test CRP Test jest badaniem służącym do ilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego w próbce krwi. Jeżeli w badanej próbce krwi znajduje się białko C-reaktywne, będzie zachodzić reakcja z przeciwciałami anti-CRP obecnymi w postaci odrębnych linii na płytce testowej. W zależności od poziomu stężenia CRP ukażą się odpowiednie prążki testowe.

**\*\* Kiedy należy wykonywać test CRP ? \*\***

Test powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na infekcję, takich jak: stan podgorączkowy, bóle głowy, gorączka, czy ogólne osłabienie. Zanim wybierzemy się do lekarza, warto sprawdzić, czy infekcja ma podłoże bakteryjne - wymagające antybiotyku, czy wirusowe - wymagające leczenia objawowego lekami dostępnymi bez recepty. CRP Test można wykonać o dowolnej porze dnia.

**\*\*Co oznacza linia, która pojawia się przy literce C na płytce testowej? \*\***

Jest to linia kontrolna. Pojawienie się barwnego prążka pod literką C świadczy o tym, że test działa prawidłowo oraz że badanie zostało wykonane prawidłowo.

**\*\*Czy intensywność zabarwienia linii w okienku wynikowym wpływa na interpretację testu? \*\***

Intensywność zabarwienia linii pojawiających się na teście CRP Test nie ma znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Interpretacji dokonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji w punkcie „INTERPRETACJA WYNIKÓW”.

**\*\* Czy po czasie dłuższym niż 7 minut wynik testu będzie w dalszym ciągu wiarygodny? \*\***

Nie. Wynik testu powinien być odczytany po czasie 5 minut od momentu dodania roztworu, a wynik wiarygodny utrzymuje się do 7 minut.