

Debutir, czopki doodbytnicze, 10 czop.



Cena: 33,13 zł

Opis słownikowy

Postać	Czopki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Debutir Czopki doodbytnicze

OPIS PRODUKTU I PRZEZNACZENIE

Debutir[®] czopki wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Czopek wprowadzony do kanału odbytu, po zetknięciu ze śluzem wytwarzanym fizjologicznie przez komórki kubkowe błony śluzowej odbytu, wytwarza na powierzchni błony śluzowej ochronną powłokę o właściwościach mukoadhezyjnych. Stanowi to ochronę oraz poprawia nawilżenie błony śluzowej odbytu.

SKŁAD

Jeden czopek doodbytniczy Debutir[®] o masie 2 g zawiera: maślan sodu, alginian sodu, karboksymetylocelulozę, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

STOSOWANIE

Otwieranie blistra - wydobycie czopka z blistra powinno nastąpić bezpośrednio przed jego zastosowaniem. W tym celu należy oderwać folię wzdłuż perforacji i rozchylić listki folii. Następnie

odstłonić czopek i ostrożnie wyjąć go z blistra. Czopka nie należy wydobywać poprzez wyciskanie. Sposób użycia. Przed aplikacją wyrobu należy umyć i osuszyć ręce. Czopek należy ostrożnie umieścić w kanale odbytu. Wprowadzenie czopka do odbytu najwygodniej jest wykonać w pozycji bocznej, leżącej, z lekko podkurczonymi nogami. Zaleca się aplikację czopka na noc. Po użyciu produktu, należy umyć ręce. Czopki doodbytnicze można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu w porozumieniu z lekarzem może być kontynuowane do 10 dni. Zaleca się stosować jeden czopek na dobę. Przerwa pomiędzy pierwszą a kolejną aplikacją czopka nie powinna być krótsza niż 24 godziny. Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia.

DODATKOWE INFORMACJE

Główne przeciwwskazania:

1. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład czopków.
2. Zmiany nowotworowe odbytnicy.
3. Silny, ostry ból okolicy odbytu.
4. Krwawienie z odbytnicy samoistne lub przy wypróżnianiu, rozumiane jako występowanie jasnoczerwonej krwi na stolcu.

Przeciwwskazanie 1 sformułowano na podstawie analizy ryzyka na etapie projektowania. Przeciwwskazanie 2, 3, 4 sformułowano na podstawie wiedzy, iż stany kliniczne wymienione w tych punktach wymagają konsultacji z lekarzem. W tych przypadkach wyrób medyczny Debutir czopki doodbytnicze może być stosowany tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarskie

Ostrzeżenia

Wyrób nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Nie stosować wyrobu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych.

W ciąży i w trakcie karmienia stosowanie wyrobu wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarskie.

Nie stosować w trakcie stosowania innych doodbytniczych wyrobów i leków bez porozumienia i konsultacji z lekarzem.

Nie stosować wyrobu Debutir dopochwowo.

Wyrób medyczny Debutir przeznaczony wyłącznie do stosowania doodbytniczego – nie spożywać wyrobu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15 - 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłem ciepła, wilgocią. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu. Nie stosować wyrobu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański