

DeflaGyn Zestaw do Podawania/Aplikatory Wielokrotnego użytku, 150 ml (+ 2 aplikatory)



Cena: 193,36 zł

Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	EXELTIS POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

ŻEL DOPOCHWOWY WSPOMAGAJĄCY SPONTANICZNĄ REMISJĘ I REGRESJĘ:

- NIEPRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW CYTOLOGII SZYJKI MACICY (ASC-US (Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu), ASC-H (Atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL), LSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego), HSIL (Zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego) / PAP II-p, PAP-III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID);
- lub
- ZMIAN NA SZYJCE MACICY WYWOŁANYCH WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV);
- lub
- ZMIAN NA SZYJCE MACICY Z DODATNIM WYNIKIEM BIOMARKERÓW p16/Ki-67;
- lub
- NIENOWOTWOROWYCH ZMIAN NA SZYJCE MACICY.

Składniki

5 ml żelu dopochwowego DeflaGyn (1 dawka) zawiera: wysoce dyspergowany Dwutlenek krzemu 10,0 mg, Kwas cytrynowy 24,8 mg, Selenian sodu, 0,83 mg (w przeliczeniu na Selen 0,25 mg), substancje pomocnicze: Hydroksyetyloceluloza, Woda, Sorbinian potasu, Benzoesan sodu.

Sposób użycia:

1 raz dziennie dopochwowo

Dawkowanie:

Pacjentki niemiesiączkujące

Produkt DeflaGyn® należy stosować przez trzy okresy po 28 dni. Po 28 dniach leczenia, należy przerwać stosowanie żelu dopochwowego DeflaGyn® na 3 dni. Następnie należy kontynuować leczenie przez kolejne 28 dni i ponownie przerwać na kolejne 3 dni. Następnie należy kontynuować leczenie rozpoczynając trzeci cykl leczenia.

Pacjentki miesiączkujące

Żelu dopochwowego DeflaGyn® nie należy stosować w trakcie miesiączki (przez około 3-5 dni w cyklu).

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych 3 dni przerwy, ponieważ miesiączkę należy traktować jak przerwę w leczeniu.

Stosowanie żelu dopochwowego DeflaGyn® można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu.

Działanie: ŻEL DOPOCHWOWY WSPOMAGAJĄCY REMISJĘ W PRZYPADKU NIEJEDNOZNACZNEGO WYNIKU CYTOLOGII SZYJKI MACICY. DeflaGyn® to żel dopochwowy, który zawiera dwutlenek krzemu. DeflaGyn®:

- wiąże patogeny
- hamuje rozprzestrzenianie się patogenów
- wprowadza ochronę antyoksydacyjną.

OSTRZEŻENIA:

Żel dopochwowy DeflaGyn® należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza

w okresie ciąży. Leki do podawania dopochwowego (stosowane w celach terapeutycznych i/lub oczyszczających i/lub jako środki antykoncepcyjne) należy stosować nie wcześniej niż po dwóch godzinach od zastosowania żelu dopochwowego DeflaGyn®. W trakcie stosowania żelu dopochwowego DeflaGyn®, można odbywać stosunki seksualne w dowolnym czasie.

W przypadku lekko czerwonego zabarwienia na brzegach i wewnątrz zakrętki, produkt może być stosowany, gdyż nie wpływa to na jego jakość.

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach może wystąpić pieczenie i swędzenie

Przeciwwskazania: Nie należy stosować żelu dopochwowego DeflaGyn® w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Równoczesne stosowanie żelu dopochwowego DeflaGyn® i produktów, które znajdują się w pochwie (np. pierścieni dopochwowych), może zmniejszać skuteczność tych produktów i w związku z tym jest przeciwwskazane. Nie używać aplikatora, jeśli nie został dokładnie umyty lub został uszkodzony. Aplikator używać wyłącznie do aplikowania żelu DeflaGyn®.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 5 - 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość: butelka 150 ml i 2 aplikatory wielokrotnego użycia