

# Depan Gruszka medyczna z miękkim końcem o pojemności 30ml (nr 2), 1 szt.



Cena: 3,28 zł

## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KIEVGUMA LLC.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

**To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.**

### Wskazania do stosowania:

Gruszka medyczna służy do usuwania wydzieliny kataralnej z nosa oraz wody i woskowiny z uszu u dzieci i niemowląt. Czynności tę wykonuje się w celu zapobiegawczym przeciwko infekcjom górnych dróg oddechowych oraz stanom zapalnym uszu.

### Sposób użycia:

Możliwe są dwa sposoby użycia:

1. Na sucho (zasysanie) - w celu udrożnienia nosa z wydzieliny kataralnej bądź oczyszczenia uszu z wody lub zalegającej woskowiny.
2. Na mokro (irygacja) - w celu oczyszczenia nosa wodą. Podstawę gruszki należy ścisnąć palcami, następnie przyłożyć końcówkę do otworu nosowego bądź usznego i zwolnić ucisk.

Po użyciu należy umyć gruszkę ciepłą wodą z mydłem. Zaleca się po każdym użyciu i umyciu wygotować gruszkę (do 10 minut)

### Środki ostrożności:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
- zabieg usuwania wydzieliny za pomocą gruszki medycznej powinna wykonywać osoba dorosła,
- po każdym użyciu należy dokładnie umyć gruszkę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie ją wygotować,
- nie wkładać do mikrofalówki
- do czyszczenia gruszki nie używać środków dezynfekcyjnych i detergentów (poza mydłem),
- przechowywać z dala od silnego działania promieni słonecznych,
- każdy incydent medyczny związany z wyrobem należy zgłaszać producentowi i odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania,

- czynności związane z używaniem gruszki powinny być wykonywane jedynie przez osoby dorosłe.

Dla dzieci i niemowląt zaleca się stosowanie gruszek w rozmiarach: 30 ml i 80 ml, dla dorosłych w rozmiarze 135 ml.

## Galeria

