

Depan, Komora inhalacyjna dla dorosłych i dzieci, 1 sztuka



Cena: 38,67 zł

Opis słownikowy

Postać	Komora inhalacyjna
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NINGBO YINGMED
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Przyjazna, ergonomiczna konstrukcja. Antystatyczna komora inhalacyjna, w porównaniu do inhalatorów ciśnieniowych umożliwia skuteczniejszą metodę podania leku np. sterydu wziewnego. Jest mniejsza niż większość typowych komór inhalacyjnych, zawiera ustnik, przezroczystą, antystatyczną komorę oraz zawór niskooporowy, który pomaga zmierzyć liczbę oddechu i wstrzymanie oddechu.

Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozoli do inhalacji

Opakowanie zawiera:

- komorę inhalacyjną
- maseczki na twarz (1 dla dziecka, 1 dla osoby dorosłej)
- zintegrowane z komorą mocowanie dozownika na lek w aerozolu
- instrukcję używania

Sposób użycia:

Należy zapoznać się z pełną instrukcją używania przed przystąpieniem do inhalacji.

1. Zdejmij osłonkę z dozownika z lekiem i umieść go we wskazanym na rysunku miejscu.
2. Potrząśnij dozownikiem zamocowanym do tuby, z nałożoną maseczką.
3. Przyłóż maseczkę do twarzy tak, by zakrywała usta i nos.
4. Po wykonaniu wydechu uruchom dozownik i wykonując głęboki, powolny wdech, przyjmij dawkę leku.
5. Wstrzymaj oddech na 8-10 sekund lub oddychaj powoli przez komorę, biorąc 2-3 wdechy (w zależności od zaleceń lekarza).
6. Przed kolejnymi powtórzeniami inhalacji postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dołączonej do leku i dozownika.
7. Po zakończeniu inhalacji wyjmij z komory inhalacyjnej dozownik z lekiem.