

Dexicor, żel do oczu, 10 g

Cena: 24,61 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NTC S.R.L.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

DEXICOR to wyrób medyczny, w postaci sterylnego żelu do oczu, pomagający utrzymać nawodnienie oraz zabezpieczający powierzchnię oka poprzez tworzenie filmu ochronnego.

ZASTOSOWANIE/ WSKAZANIA

DEXICOR pomaga utrzymać fizjologiczną równowagę powierzchni oka, zapewniając nawodnienie i ochronę nabłonka rogówki. Preparat zapewnia ulgę dla oka w przypadku suchości i uczucia ciała obcego, piekących i zmęczonych oczu wynikających z długotrwałego korzystania z komputera, oglądania telewizji oraz ekspozycji na ogrzewanie czy klimatyzację. Właściwości fizyczne karbomeru pozwalają żelowi DEXICOR na wiązanie cząsteczek wody, tworząc na powierzchni oka nawilżający film, która pozwala na wydłużenie średniego czasu rozpadu filmu łzowego u pacjentów cierpiących na zespół suchego oka i inne stany, których objawem jest suche oko.

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DEXICOR?

DEXICOR pomaga utrzymać fizjologiczną równowagę powierzchni oka, zapewniając nawodnienie i ochronę nabłonka rogówki.

Preparat zapewnia ulgę dla oka w przypadku suchości i uczucia ciała obcego, piekących i zmęczonych oczu wynikających z długotrwałego korzystania z komputera, oglądania telewizji oraz ekspozycji na

ogrzewanie czy klimatyzację.

Właściwości fizyczne karbomeru pozwalają żelowi DEXICOR na wiązanie cząsteczek wody, tworząc na powierzchni oka nawilżający film, która pozwala na wydłużenie średniego czasu rozpadu filmu łzowego u pacjentów cierpiących na zespół suchego oka i inne stany, których objawem jest suche oko.

JAK STOSOWAĆ DEXICOR?

1. Dokładnie umyj i wysusz ręce przed użyciem produktu
2. Odchyl głowę.
3. Delikatnie odciągnij dolną powiekę do momentu utworzenia się małej kieszonki pomiędzy powieką a okiem.
4. Trzymaj tubkę nad okiem.
5. Naciśnij delikatnie tubkę, aplikując po jednej kropli do każdego oka.
6. Dokładnie zakręć nakrętkę po użyciu.

SKŁAD/ SKŁADNIKI

Dekspantenol 50 mg, karbomer, wersenian disodowy, wodorotlenek sodu, wodę, cetrimid.

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikuj po 1 kropli preparatu do każdego oka. Jeżeli występuje konieczność podania dodatkowych dawek, powtórz aplikację co każde 3-4 godziny lub według wskazań lekarza.

OSTRZEŻENIA/ PRZECHOWYWANIE

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jakikolwiek ze składników preparatu.

W przypadku podrażnienia, należy zaprzestać stosowania oraz skonsultować się z lekarzem.

Po aplikacji może wystąpić chwilowe pogorszenie widzenia związane z lepkością produktu.

Nie stosować jeżeli produkt jest uszkodzony.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od 9 do 25°C.

Nie połykać.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

POSTAĆ/ POJEMNOŚĆ

Żel, 10 g w tubce

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR

Solinea Sp. z o.o. Sp. K

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn