

Disnemar dla niemowląt i dzieci, aerozol do nosa, 25 ml (250 daw.)



Cena: 30,83 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Postać | Aerozol |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | INPHARM SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Disnemar baby to fizjologiczny roztwór soli mineralnych o pH optymalnym do stosowania w obrębie jamy nosowej. Pomaga utrzymywać higienę nosa oraz prawidłowy stan błony śluzowej.

Preparat:

- czyści i myje;
- zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia;
- wspomaga regenerację;
- udrażnia przewody nosowe, usuwając wydzielinę.

Dzięki zachowaniu odpowiednich proporcji między składnikami, Disnemar baby jest pozbawiony właściwości drażniących. Produkt posiada specjalny dozownik, który posiada kształt i wielkość dostosowaną do wprowadzania go do otworu nosowego dziecka. Nebulizator mikrodyfuzyjny zapewnia aplikację roztworu w postaci delikatnej mgiełki oraz umożliwia podawanie aerozolu w każdej pozycji.

Disnemar baby dedykowany jest dzieciom i niemowlętom już od 1. dnia życia. Nie ma przeciwwskazań co do użytkowania produktu w czasie ciąży i laktacji.

Wskazania:

- W niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi, w nawilżaniu wysuszonej błony śluzowej nosa, w codziennej higienie nosa.

- Codzienna, prawidłowa higiena nosa.
- Nawilżanie wysuszonej błony śluzowej jamy nosowej.

Właściwości:

Disnemar ułatwia czyszczenie, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację. Jednocześnie, dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu pomaga udrożnić nos.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Dawkowanie

Dzieci i niemowlęta:

1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.

Dorośli:

1 - 2 dawek do każdego otworu nosowego kilka razy w ciągu dnia.

Jeśli to konieczne Disnemar baby może być stosowany przez dłuższy czas bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem aerozolu należy nacisnąć dozownik 1 – 3 razy, aby aktywować pompkę dozującą i uzyskać odpowiednie rozpylanie roztworu.

U niemowląt karmionych piersią wskazane jest podawanie Disnemaru przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa ułatwia połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Nie zaleca się wyjmowania dozownika po użyciu. Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia go, należy użyć ręcznika lub chusteczki. Z jednego opakowania otrzymuje się około 250 dawek.

Skład:

Wysocze oczyszczony fizjologiczny roztwór wody morskiej.

Wytwórca

Abbott Products Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa