

Durex RealFeel, prezerwatywy, 10 szt.



Cena: 38,45 zł

Opis słownikowy

Postać	Prezerwatywy
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis:

Cechy:

- Bez lateksu - w produkcji wykorzystano materiał bezpieczny w użytku dla osób uczulonych na białka lateksu.
- Naturalne doznania - zaprojektowany by zapewnić uczucie "Skin to Skin", poczucia bliskości z zachowaniem najwyższej ochrony.
- Silikonowy lubrykant - zapewnia nawilżenie i ochronę przed nieprzyjemnym tarciem gwarantując komfort użytkowania.
- Standardowy rozmiar - prezerwatywy dopasowane do regularnej wielkości członka (szerokość 56 mm).
- Bezpieczeństwo - produkt przetestowany dermatologicznie. Każda seria prezerwatyw Durex przechodzi dodatkowe testy jakości.

Prezerwatywy Durex zostały zaprojektowane by dawać maksimum satysfakcji osobom uczulonym na białka lateksu. To przepis na bezpieczny seks i randki bez obaw o odpowiednią ochronę.

Materiał Real Feel pomaga potęgować przyjemność obojga i osiągnąć intensywniejszy orgazm. Formuła "Skóra do Skóry" sprzyja nieskrępowanej rozkoszy i budowaniu poczucia bliskości. To intymność i namiętność - bez lateksu, bez problemu.

Pamiętaj, że skuteczność prezerwatyw Durex zależy od prawidłowego użycia, a żadna antykoncepcja nie chroni w 100% przed ciążą czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dowiedz się więcej i zapoznaj się z informacjami dołączonymi do opakowania, szczególnie jeśli uprawiasz seks analny lub oralny.

Prezerwatywy wykonane z poliizoprenu (materiał nie lateksowy, odpowiedni dla osób uczulonych na białka lateksu naturalnego).

Przygotowanie i stosowanie

Przed użyciem

Sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją

wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. Załóż prezerwatywę, zanim penis dotknie drugiej osoby. Pomaga to zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas seksu waginalnego, analnego i oralnego.

Instrukcja używania

1. Rozerwij opakowanie od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami.
2. Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu.
3. Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem.
4. Wrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PREZERWATYW I UCZULENIA NA LATEKS: Durex REAL FEEL są wykonane z poliizoprenu. Jest to materiał nie lateksowy, dlatego jest odpowiedni dla osób uczulonych na białka lateksu naturalnego. Real Feel mają minimalny potencjał wywoływania reakcji nadwrażliwości opóźnionej (zwanej również „nadwrażliwością typu IV” i „kontaktowym zapaleniem skóry”). Mimo to niektóre osoby uczulone na lateks mogą wykazywać nadwrażliwość na te prezerwatywy. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna należy zaprzestać używania i zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania:

Stosuj tylko żele intymne zalecane do użycia z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. **ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA:** Jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększyć ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

KIEDY NALEŻY ZASIĘGNAĆ PORADY

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony/uczulona na lateks, jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub przecieknie podczas stosunku należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Prezerwatywy Durex. **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.** Producent: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited. Upoważniony przedstawiciel: RB NL Brands B.V. Podmiot prowadzący reklamę: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.,
ul. Okunin 1,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki