

Eko Termofor gumowy w pokrowcu 2 l, 1 szt.



Cena: 19,54 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Właściwości i przeznaczenie:

Wykonany z wysokiej jakości naturalnej gumy, z ryflowanymi ściankami. Stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia dolegliwości bólowych. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami.

Termofor gumowy Eco w pokrowcu o pojemności 2 litrów to jedna z naszych propozycji termoforów dla dorosłych. Wysokiej klasy guma zagwarantuje doskonałą termikę, natomiast pokrowiec zapewni przyjemny dotyk dla ciała.

Dobry termofor zda egzamin w domowej terapii przeziębień, czy też innych stanów chorobowych. Termofor jest wyrobem medycznym.

KOLOR I WZÓR WYSŁANY LOSOWO!

Sposób użycia:

Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.

Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylanie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.

Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Przechowywanie:

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Czyszczenie:

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać tylko ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze do 30°C. Termoform gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Termoform może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą termoforma bez pokrowca. Nie obciążaj termoformu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoformie oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylij go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoformu, może spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej. Zachowaj instrukcję użytkowania.

Galeria

