

Excilor 2w1 Leczenie Brodawek i Kurzajek, sztyft, 1 op.



Cena: 54,42 zł

Opis słownikowy

Postać	Sztyft
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Leczenie brodawek i kurzajek 2 w 1 marki Excilor to wyrób medyczny do samodzielnego stosowania, który pomaga w pozbyciu się kurzajek i brodawek. Preparat działa na zasadzie połączenia dwóch metod stosowanych w celu leczenia tych przypadłości – terapii kwasowej oraz krioterapii. Pojedyncza terapia produktem trwa jedynie 5 dni.

Skład:

Substancja zamrażająca, TCA-Active™ (na bazie kwasu trichlorooctowego), Carbopol, Woda.

Zawartość opakowania:

Niebieski zbiornik, zawierający środek zamrażający oraz biały aplikator, zawierający żel; torebka z 5 piankami; instrukcja używania.

Sposób działania:

Wyrób medyczny Leczenie brodawek i kurzajek 2 w 1 łączy w sobie dwie najpopularniejsze metody leczenia tych dwóch dermatologicznych przypadłości – terapię kwasową oraz krioterapię. Działa zarówno od wewnątrz (poprzez zamrażanie) jak i od zewnątrz (działanie kwasem). Za pomocą szybkiego zamrożenia (-45°C) korzenia brodawki i złuszczenie zainfekowanej skóry, pogrubiona warstwa skóry brodawki oraz wirus ją wywołujący są usuwane, a w to miejsce pojawia się zdrowa, odnowiona skóra.

Przeznaczenie:

Do samodzielnego usuwania brodawek i kurzajek.

Sposób użycia:

Dorośli: Krioterapia 1 x dziennie pierwszego dnia. Następnie terapia kwasowa 2 x dziennie przez kolejne 4 dni.

Dzieci 4-12 lat: Krioterapia 1 x dziennie pierwszego dnia. Następnie terapia kwasowa 1 x dziennie przez kolejne 4 dni.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Nie połykać ani nie wdychać substancji zamrażającej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki lub informacją znajdującą się na opakowaniu wyrobu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu żelu z oczami lub błonami śluzowymi przepłukać dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy medycznej.

Substancja zamrażająca jest łatwopalna i może powodować odmrożenia zdrowej skóry.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przed rozpoczęciem leczenia wielu brodawek, przy pierwszym zastosowaniu produktu, należy leczyć tylko jedną brodawkę w celu sprawdzenia efektu działania na skórze.

Leczenie kolejnej brodawki można rozpocząć tylko, jeśli nie wystąpią żadne skutki uboczne (zazwyczaj w ciągu 5 dni).

Jeśli kilka brodawek występuje w niewielkiej odległości od siebie wynoszącej ok. 1 cm, przed rozpoczęciem leczenia kolejnej brodawki należy odczekać, aż skóra powróci do normalnego stanu (może to potrwać do 6 tygodni)

Jeśli brodawka nie zniknie całkowicie, leczenie można powtórzyć maksymalnie 3 razy.

Producent

MEDICAL BRANDS

Piet Heinkade 199

Amsterdam, Holandia