

# FixSin Zestaw do płukania nosa/zatok, aerozol do nosa, roztwór, 30 sasz.

Cena: 11,13 zł



## Opis słownikowy

Postać	Zestaw
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Zestaw uzupełniający zawiera 30 saszetek z proszkiem do sporządzenia roztworu i jest przeznaczony do stosowania z butelką wchodzącą w skład zestawu podstawowego FIXSIN. Ektoina zawarta w preparacie wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizuje błony komórkowe. Dzięki połączeniu chlorku sodu i ektoiny preparat łagodzi objawy nieżyty nosa i zapalenia zatok. FIXSIN udroźnia oraz oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, ograniczając gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji.

Zawartość: 30 saszetek

Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok

### INFORMACJE DLA PACJENTA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Informacje dodatkowe

Po odbytej operacji ucha przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem konieczna jest konsultacja lekarska. Do płukania nie używa wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzygotowanej wody z kranu.

### Wskazania

Każdy z zestawów zaleca się w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok – szczególnie w takich przypadkach, jak:

- zapalenie zatok przynosowych,
- nieżyty nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- utrzymanie higieny nosa i zatok

Do przeprowadzenia płukania niezbędna jest butelka dostępna w zestawie FIXSIN zestaw podstawowy.

Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp. poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania należy sprawdzić temperaturę wody.

Jedna saszetka wybranego zestawu FIXSIN w połączeniu z odpowiednią ilością wody (zgodnie z pojemnością butelki wybranego zestawu) tworzy gotowy roztwór do płukania nosa i zatok.

Zestaw jest bezpieczny i może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn oraz urządzeń mechanicznych.

Po przeprowadzeniu płukania w obrębie jamy nosowej może wystąpić lekkie uczucie pieczenia.

#### **Przeciwwskazania**

Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub infekcją ucha. Nie używać w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu lub ektoinę.

Po odbytej operacji ucha przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Skład**

99% chlorek sodu Ph.Eur., 1% ektoina (Ectoin®)

#### **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

#### **Podmiot odpowiedzialny**

Solinea Sp. z o. o. Sp. K.

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn