

FixSin Zestaw do płukania nosa/zatok podstawowy + ektoina, zestaw, 1 zest.



Cena: 17,58 zł

Opis słownikowy

Postać	Zestaw
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Zestaw do płukania nosa i zatok FixSin udroźnia i oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstanie infekcji. Ektoina zawarta w preparacie wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizuje błony komórkowe. Dzięki połączeniu chlorku sodu i ektoiny preparat łagodzi objawy nieżyty nosa i zapalenia zatok.

Zawartość: zestaw podstawowy: butelka o poj. 240 ml + 15 saszetek

Postać farmaceutyczna: zestaw do płukania nosa i zatok

INFORMACJE DLA PACJENTA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje dodatkowe

Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza.

Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp. poniżej 19°C).

Dokładna instrukcja użycia znajduje się w ulotce.

Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem.

Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania należy sprawdzić temperaturę wody.

Zestaw jest bezpieczny i może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.
Po przeprowadzeniu płukania w obrębie jamy nosowej może wystąpić lekkie uczucie pieczenia.

Wskazania

Każdy z zestawów zaleca się stosować w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:

- zapalenia zatok przynosowych
- nieżyty nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- dla utrzymania higieny nosa i zatok

Przeciwwskazania

Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub infekcją ucha. Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Skład

99% chlorek sodu Ph. Eur., 1% ektoina (Ectoin®)

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o. o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn