

Gargarin ZATOKI zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok, proszek do sporządzania roztworu, 1 but. + 16 sasz.



Cena: 15,66 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	FARMINA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Gargarin ZATOKI Zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok 16 saszetek (2,15 g każda)

Roztwór Gargarin Zatoki oczyszcza nos i zatoki z bakterii, wirusów, alergenów oraz pyłu jednocześnie nawilżając śluzówkę. Chroni drogi oddechowe przed infekcjami.

Wskazania:

- zapalenie zatok przynosowych,
- nieżyt nosa,
- alergiczny nieżyt nosa,
- po ekspozycji na alergeny (pyłki roślin, kurz, pierze, sierść zwierząt domowych),
- przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,
- profilaktycznie w celu utrzymania higieny nosa i zatok oraz do oczyszczania nosa i zatok po kontakcie z powietrzem zawierającym duże stężenie pyłu.

Skład: 100% chlorek sodu Ph.Eur.

Sposób użycia:

1. Do dołączonej do zestawu podstawowego Gargarin Zatoki butelki, wsyp zawartość 1 saszetki (roztwór izotoniczny) lub zawartość 2 saszetek (roztwór hipertoniczny).
2. Napełnij butelkę przegotowaną i wystudzoną do temperatury ciała wodą. Ilość wody powinna się zgadzać do zaznaczonej linii

wartości 240 ml.

3. Zakręć butelkę i zakrywając palcem otwór dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia się zawartości saszetki.
4. Nachyl się lekko nad umywalką, przyłóż butelkę do jednego z otworów nosowych i swobodnie oddychaj przez usta.
5. Ściśnij butelkę spokojnym, płynnym ruchem. Roztwór zostanie wprowadzony do nosa, a następnie wypłynie drugim roztworem nosowym. Połowa zawartości butelki powinna posłużyć do przepłukania jednego otworu nosowego.
6. Następnie potórz płukanie dla drugiego otworu nosowego pozostałym roztworem. Niewykorzystaną ilość roztworu wylej.
7. Po wypłukaniu delikatnie oczyść nos poprzez wydmuchanie. Nie połkaj roztworu jeśli dostanie się do gardła.
8. Po przepłukaniu nosa i zatok butelkę i zakrętkę Gargarin Zatoki umyj i pozostaw do wyschnięcia.

Działania niepożądane: Nie występują gdy produkt jest stosowany zgodnie z instrukcją używania.

Przeciwwskazania: Całkowicie zablokowany nos, infekcja ucha lub uczucie zatkania. Po odbytej operacji ucha przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem. U dzieci stosowanie należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Nie stosować po upływie daty ważności. Do płukania nie używać nieprzegotowanej wody.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25oC, w oryginalnym opakowaniu. Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek części zestawu.

W skład zestawu uzupełniającego wchodzi 32 saszetki z proszkiem do sporządzania roztworu. Dostępny jest także zestaw podstawowy zawierający butelkę 240 ml oraz 16 saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu.

Wytwórca: Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.