

Gruszka z kanką nr 11, 1 szt.



Cena: 16,69 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Wskazania:

Gruszki Sanity z kanką przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Wyrób ten posiada znak CE. Jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Cechuje się wysoką jakością wykonania.

Zawartość opakowania

Gruszka z kanką, 1 sztuka.

Wskazania:

Wyrób może być stosowany pomocniczo w przypadku: zaparcí, skurczy jelit, bólów brzucha, trudności z wypróżnieniem.

Sposób użycia:

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Przed użyciem należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdorazowo, przed zabiegiem, należy wyjąć każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurzyć na kilka minut w gotującej się wodzie.

Po ostudzeniu, należy napełnić gruszkę płynem do przepłukiwania ciała o temperaturze nie przekraczającej 40°C.

Kankę nasmarować cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadzić delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ścisnąć gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zacisnąć mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Produktu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej.

Nie należy stosować środków dezynfekujących.

W razie uszkodzenia jednej z części wyrzucić cały zestaw.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce