

Gruszka z miękkim końcem Nr 9, 1 szt.

Cena: 9,13 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Zapobiega infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa oraz zapobieganiu podrażnieniom i stanom zapalnym uszu, dzięki usuwaniu za ich pomocą wody i woskowiny. Miękką i zaokrągloną końcówką zapewnia bezpieczeństwo i komfort w użyciu.

Przeznaczenie:

Gruszki z miękkim końcem służą do udrażniania dróg oddechowych u dzieci i dorosłych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa lub zabrudzeń z ucha.

Sposób użycia:

Gruszkę ścisnąć i umieścić jej końcówkę w nosie lub uchu dziecka.

Następnie zasysać wydzielinę.

Produkt może być stosowany zarówno na sucho (zasysanie) lub na mokro (irygacja).

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją dołączoną do wyrobu.

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera: 1 gruszkę do nosa z miękką końcówką.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uszkodzony wyrób należy wyrzucić do kosza.

Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu medycznego.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce