

Helicobacter Antygen Test z kału, 1 szt.



Cena: 34,71 zł

Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis produktu

Produkt marki Domowe Laboratorium jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro do samokontroli w postaci jednorazowego testu do wykonania w domu, który umożliwia wykrycie z kału bakterii Helicobacter pylori. Zasada jego działania oparta jest na reakcji antygen-przeciwciała.

Skład Helicobacter Antygen TEST z kału

W opakowaniu Helicobacter Antygen Test z kału znajduje się wyposażenie, które niezbędne jest do wykonania pojedynczego badania na obecność w kale antygenów Helicobacter pylori. W skład produktu wchodzi:

- szczelnie zamknięta foliowa kopertka, zawierająca płytkę testową oraz środek pochłaniający wilgoć;
- pojemnik wypełniony roztworem ekstrakcyjnym, który wyposażony jest w aplikator do pobierania próbki kału;
- instrukcję obsługi.

Wskazania do zastosowania Helicobacter Antygen TEST z kału:

Helicobacter Antygen Test z kału jest szybkim domowym testem skriningowym przeznaczonym do wykrywania w kale obecności antygenów bakterii Helicobacter pylori. Wskazany jest dla osób w ramach profilaktyki, jak również pacjentów, którzy posiadają u siebie różnego rodzaju dolegliwości jelitowo-żołądkowe oraz problemy skórne. Objawy zakażenia bakterią Helicobacter pylori są niejednoznaczne i mogą na to wskazywać:

- Trądzik
- Biegunki
- Bóle brzucha
- Zgaga

- Nieświeży oddech

Działanie Helicobacter Antygen TEST z kału:

W procesie produkcji na membranę testu zostały naniesione przeciwciała monoklonalne anty-Helicobacter pylori, które podczas badania reagują z daną bakterią obecną w próbce kału. Wynik przeprowadzonego testu odczytujemy po 10 minutach na podstawie prążków ukazujących się na płytce testowej.

Sposób użycia Helicobacter Antygen TEST z kału:

Przed rozpoczęciem badania Helicobacter Antygen Test z kału należy przygotować zegarek odmierzający czas do odczytu wyniku oraz chusteczkę higieniczną, przy pomocy której trzeba odłamać końcówkę w pojemniku do próbek kału. Następnie musimy przygotować materiał do badania, który można pobrać o każdej porze dnia do dokładnie umytego i osuszonego pojemnika. Należy jednak pamiętać, że próbka kału nie może być pobrana podczas antybiotykoterapii lub kuracji inhibitorami pompy protonowej bądź preparatami bizmutu. W trakcie pobierania próbki kału należy trzymać pojemnik niebieskim końcem skierowanym ku górze, białym ku dołowi. Następnie musimy odkręcić niebieską nakrętkę, po czym za pomocą aplikatora pobrać próbkę do badania poprzez trzykrotne „wkręcenie” jego końcówki na głębokość około 1 cm w różnych miejscach badanego kału, tak by powierzchnia aplikatora pokryta była cienką warstwą. Następnie aplikator z próbką kału wprowadzamy z powrotem do pojemnika zawierającego roztwór ekstrakcyjny, szczelnie zakręcamy i energicznie potrząsamy. Badanie powinniśmy wykonać niezwłocznie po przygotowaniu próbki kału, w ciągu godziny. Po pobraniu próbki otwieramy aluminiową kopertkę, wyjmujemy płytkę testową i kładziemy ją na powierzchni poziomej. Następnie odkręcamy białą nakrętkę i potrząsamy pojemnik. Tak pobrany materiał dokładnie wymieszaj się z płynem. Później przy pomocy chusteczki odłamujemy końcówkę pojemnika, po czym ściskamy jego ścianki w celu naniesienia 3 kropli powstałej mieszanki do testowego okienka znajdującego się na płytce, tak by końcówką nie dotykać owej płytki. Pozostałość mieszanki wylewamy do toalety, zaś pusty pojemniczek wyrzucamy do kosza. Wynik testu należy odczytać po upływie 10 minut, maksymalnie do 20.

Interpretacja wyników testu: 10 minut po wykonaniu testu ukazuje się wynik:

- *pozytywny* – wówczas na płytce testu w strefie kontrolnej C oraz strefie testowej T ukazują się oba paski;
- *negatywny* – w takim przypadku w okienku testowym pojawia się tylko pasek kontrolny C, brak widoczności paska testowego T;
- *nieważny* – mamy z nim do czynienia, gdy w testowym okienku nie pojawiają się żadne paski, bądź widoczny jedynie jest prążek w testowej strefie T.