

HelloBaby test ciążowy - płytkowy, 1 szt.

Cena: 3,70 zł



Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDS. FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Wyrób medyczny Test ciążowy płytkowy o czułości 10 mIU/ml.
Zawartość opakowania: 1 test ciążowy

- Dokładny – wiarygodność testu wynosi 99%
- Szybki – wynik w ciągu 3-5 minut
- Czuły – wykrywa obecność hCG już przy stężeniu 10 mIU/ml
- Wygodny – do użytku o każdej porze dnia

Sposób użycia:

1. W celu przeprowadzenia badania należy wyjąć test z foliowego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu. Następnie należy wypakować pipetę oraz test ciążowy, który należy położyć na płaskiej poziomej powierzchni.
2. Zanurzyć końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu. Ściskając szeroką część pipety nabrać próbkę moczu.
3. Trzymając pipetę z próbką moczu pionowo nad okienkiem na próbkę moczu (miejsce wskazane strzałką na płytce testowej) umieścić w nim dokładnie 4 krople moczu.
4. Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie. Nie mniej jednak, aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 minuty. Nie odczytywać wyników po 5 minutach.

Wynik pozytywny (ciąża):

Jeżeli w strefie kontrolnej (C) oraz w strefie testowej (T) pojawiły się linie oznacza to, że jesteś w ciąży. Intensywność zabarwienia linii może się zmieniać z uwagi na zróżnicowany poziom hCG na różnych etapach ciąży.

Wynik negatywny (brak ciąży):

Jeżeli linia pojawiła się tylko w strefie kontrolnej (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży. Jeśli przypuszczasz, że jednak jesteś w ciąży (np. brak miesiączki) badanie można powtórzyć kilka dni później przy użyciu nowego zestawu testowego.

Wynik nieważny:

Wynik uznajemy za nieważny jeśli:

1. Pojawi się linia tylko w strefie testowej (T) i nie pojawi się w strefie kontrolnej (C)
2. Nie pojawi się żadna linia w strefie testowej (T) oraz w strefie kontrolnej

Zawartość zestawu:

1. Opakowanie foliowe wewnątrz którego znajduje się 1 test płytkowy, pipeta oraz pochłaniacz wilgoci. UWAGA! Pochłaniacz wilgoci służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie przechowywania i nie jest stosowany w badaniu.
2. Instrukcja użycia.

Ostrzeżenia:

1. Zestaw służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
2. Wyrzucić po użyciu. Test może być użyty tylko raz.
3. Nie używać zestawu po upływie daty ważności.
4. Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa jest dziurawa lub nie jest szczelnie zamknięta.
5. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.