


# Help4skin gojenie oparzeń, żel, 75 g

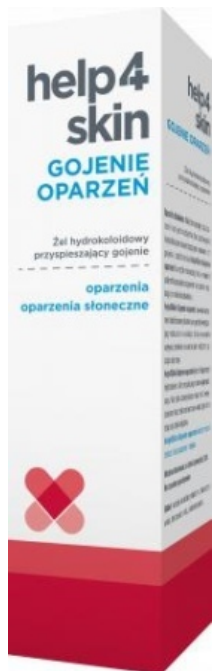

Cena: 36,01 zł

## Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Skóra jest największym organem w ludzkim ciele i zapewnia codzienną ochronę przed szkodliwymi czynnikami. Jeżeli ulegnie uszkodzeniu stajemy się bardziej podatni na infekcje i stany zapalne. Chociaż w większości przypadków nasze ciało może samo regenerować skórę, to właściwa pielęgnacja oparzeń i ran jest niezbędna dla zapobiegania komplikacjom towarzyszącym procesom ich gojenia i zablźniania.

Ciało reaguje na rany tworząc strup, który pokrywa uszkodzoną skórę i tworzy barierę przeciwko mikroorganizmom. Powoduje to spowolnienie procesu gojenia i znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia blizn, ponieważ strup musi być zerwany, w momencie tworzenia się nowej warstwy skóry. Dlatego ważne jest, poza dezynfekcją, utrzymanie wilgoci rany podczas gojenia. Ponadto, wiele ran (takich jak oparzenia) początkowo wysycha, a następnie uwalnia wilgoć. Help4Skin Gojenie oparzeń jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ją przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy staje się zbyt wilgotna.

Help4Skin Gojenie oparzeń natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującym aktywność hydrożelu ("Actipientia").

Help4Skin Gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel o udowodnionej skuteczności:

- Natychmiastowo zmniejsza ból
- Zapewnia efekt chłodzenia
- Przyspiesza gojenie
- Pomaga uniknąć infekcji
- Tworzy barierę ochronną
- Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów

## Wskazania

- Oparzenia
- Oparzenia słoneczne
- Otarcia i pęknięcia skóry

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

#### **Skład:**

kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

#### **Sposób użycia**

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę.

#### *Powierzchowne oparzenia:*

- natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody.
- raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek.

#### *Oparzenia słoneczne:*

- oczyścić oparzone miejsce,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek.

#### *Drobne rany:*

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie. Help4Skin Gojenie oparzeń nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm<sup>2</sup>).

Help4Skin Gojenie oparzeń może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami. Nie stosować Help4Skin Gojenie oparzeń na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

#### **DODATKOWE INFORMACJE**

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie. Help4Skin Gojenie oparzeń nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm<sup>2</sup>).

Help4Skin Gojenie oparzeń może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami. Nie stosować Help4Skin Gojenie oparzeń na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

#### **Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:**

- w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- w przypadku silnie zakażonych ran,
- w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań. W takich przypadkach Help4Skin Gojenie oparzeń może być pomocny, ale w żadnym wypadku nie wystarcza jako jedyny środek leczniczy.

Do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

#### **Warunki przechowywania**

Przechowywać w temperaturze między 5 a 25 . Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański