

Heviran Comfort Plastry na opryszczkę, plaster, 15 szt.



Cena: 28,36 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Heviran Comfort plastry na opryszczkę

Postać
przezroczyste plastry

Opis produktu / przeznaczenie

Heviran Comfort plastry na opryszczkę zmniejszają widoczność oraz łagodzą dolegliwości związane z opryszczką.

Wyrób medyczny jest w postaci miękkiego krążka poliuretanowego nasączonego hipoalergiczną substancją, w której rozpuszczono kwas hialuronowy (0,5%). Kwas hialuronowy, dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóry, łagodzi uczucie swędzenia i mrowienia oraz chroni przed powstawaniem blizn.

Heviran Comfort plastry na opryszczkę działają jak ochronna tarcza:

- wspomagają proces gojenia opryszczki dzięki utrzymaniu odpowiedniego mikrośrodowiska
- zmniejszają ryzyko infekcji tworząc barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi
- chronią przed przeniesieniem wirusa na inne miejsca na skórze lub zakażeniem innych osób dzięki higienicznemu sposobowi aplikacji

Heviran Comfort plastry na opryszczkę można stosować na każdym etapie rozwoju opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach.

Plastry testowane dermatologicznie. Umożliwiają nałożenie makijażu.

Skład
kwas hialuronowy (0,5%)

Stosowanie

SPOSÓB UŻYCIA:

Plaster zawiera wygodny aplikator (podłużny „ogonek”), który umożliwia higieniczne, bezdotykowe i sprawne nałożenie plastra na opryszczkę, co pozwala uniknąć zakażenia innych części ciała lub innych osób.

Otworzyć saszetkę i wyjąć plaster trzymając tylko za podłużny „ogonek”.

Przykleić plaster na opryszczkę i delikatnie odkleić „ogonek”.

Usunąć niebieską folię ochronną, dzięki temu na ustach pozostanie niewidoczny plaster.

Dodatkowe informacje

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Plaster może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Należy zachować kartonik lub saszetkę/opakowanie bezpośrednio plastra w celu ewentualnej konsultacji z lekarzem.
- Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do Wytwórcy i do URPLW MiPB.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Plastry jednorazowego użytku

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.

Przechowywać z dala od promieni słonecznych, chronić przed światłem.

Dostępne wielkości opakowań

15 plastrów

Producent

Eurosirel S.p.A.

Viale Europa, 30

Cusago 20090 (MI) – Włochy

Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel

Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański