

# Hexatiab, kapsułki dopochwowe, 10 kaps.

Cena: 35,63 zł



## Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HEXANOVA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

HEXATIAB® kapsułki dopochwowe SOFTGEL to wyrób medyczny wspomagający leczenie:

- zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych (w tym kłykciny)
- zmian poporodowych
- nawrotów infekcji opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2)

Głównym składnikiem HEXATIAB® SOFTGEL jest na opatentowany kompleks srebra TIAB, oparty na bazie jednowartościowych jonów srebra związanych kowalencyjnie z dwutlenkiem tytanu. Dzięki aktywnej formule TIAB, kapsułki dopochwowe zapobiegają rozwojowi i nawrotom infekcji, a także izolują i chronią tkanki przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, ułatwiając fizjologiczny proces tworzenia blizny i gojenia. Zadaniem HEXATIAB® jest również przywrócenie i utrzymanie naturalnych warunków fizjologicznych w pochwie.

Wyrób medyczny CE

### Działanie:

HEXATIAB® kapsułki dopochwowe SOFTGEL, dzięki zawartości cząsteczki TIAB, wspomagają proces leczenia infekcji bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oraz stanowią nowoczesną ochronę stref intymnych przed atakiem szkodliwych bakterii i grzybów.

HEXATIAB® kapsułki dopochwowe SOFTGEL zawierają w składzie także kwas hialuronowy, który uwadnia i regeneruje ściany pochwy oraz ekstrakt z Aloe vera, który ma działanie łagodzące, kojące i nawilżające.

HEXATIAB® kapsułki dopochwowe SOFTGEL działają podwójnie:

- chronią środowisko pochwy przed zewnętrznymi drobnoustrojami;
- ograniczają kolonizację drobnoustrojów w miejscu aplikacji dzięki tworzeniu najlepszych warunków do przywrócenia naturalnej fizjologii tkanek.

### Jak stosować produkt?

- Przed użyciem dokładnie umyć ręce i zewnętrzne narządy płciowe.
- Wprowadzić kapsułkę głęboko do pochwy.
- Stosować jedną kapsułkę raz dziennie przez 7 dni.
- Nie przerywać kuracji nawet gdy ustąpią niepokojące objawy.

### Wyrób medyczny o działaniu wspomagającym:

- w leczeniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych (takich jak kandydozy) i wirusowych (kłykciny)
- w leczeniu zmian poporodowych
- w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2)

Jedyna forma srebra rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

### Ostrzeżenia:

*Przeciwwskazania:* nadwrażliwość na składniki produktu.

Brak znanych przypadków przedawkowania.

Nie potwierdzono interakcji z lekami ani innymi wyrobami medycznymi

### Skład:

TIAB (mikrokryształiczny dwutlenek tytanu kowalencyjnie związany z jednowartościowymi jonami srebra), hialuronian sodu, wyciąg z Aloe Barbadensis, trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, stearynian PEG-6 (i) stearynian glikolu (i) stearynian PEG-32, stearynian glicerylu