

# Hyal Drop Multi krople do oczu (sztuczne łzy), krople do oczu, 10 ml



Cena: 28,13 zł

## Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### *Kiedy należy stosować krople Hyal-Drop multi?*

Krople Hyal-Drop multi należy stosować w stanach niedoboru łez (tzw. zespół „suchego oka”), którym towarzyszą takie objawy jak uczucie suchości oka, pieczenie lub zmęczenie oczu. Przyczyną tych objawów może być praca przy komputerze, długotrwałe oglądanie telewizji, suche powietrze w pomieszczeniach, suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych, dym papierosowy lub wymuszony nawiew powietrza. Również zażywanie niektórych leków (np. pigułek antykoncepcyjnych), niektóre schorzenia, a także konserwanty zawarte w niektórych kroplach do oczu mogą przyczyniać się do rozwoju zespołu „suchego oka”.

Krople Hyal-Drop multi poprawiają nawilżenie powierzchni gałki ocznej oraz mogą być stosowane do nawilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych. Krople Hyal-Drop multi odświeżą i ukoją Twoje oczy. Poczujesz to.

#### *Jak często można stosować krople Hyal-Drop multi?*

W razie potrzeby należy wpuścić jedną kroplę Hyal-Drop multi do worka spojówkowego. Ponieważ krople Hyal-Drop multi nie zawierają konserwantów, mogą być używane codziennie, tak często jak to konieczne. Krople Hyal-Drop multi są bardzo dobrze tolerowane również w przypadku długotrwałego stosowania.

#### **Jak stosować krople Hyal-Drop® multi:**

Opatentowany mechanizm z pompką sprawia, że krople Hyal-Drop multi są bardzo proste i bezpieczne w stosowaniu:

1. Przed każdym użyciem, zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać zakończenia pojemnika.
2. Położyć kciuk i palec wskazujący na okrągłej płytce na zakończeniu pojemnika, a małym palcem przytrzymać dno pojemnika.

3. Palcem środkowym i serdecznym przytrzymać pojemnik z boku.
4. Przed pierwszym użyciem, należy odwrócić pojemnik i kilkakrotnie nacisnąć dno pojemnika, aż spłynie pierwsza kropla.
5. Odchylić głowę delikatnie do tyłu trzymając pojemnik nad okiem.
6. Palcem wskazującym wolnej ręki delikatnie odchylić dolną powiekę. Zakończenie butelki nie powinno dotykać palców, oka lub soczewki kontaktowej.
7. Aby zakropić 1 kroplę Hyal-Drop multi należy zdecydowanie nacisnąć dno pojemnika. Opatentowany mechanizm z pompką uwolni tylko jedną kroplę. Zamknąć oko i powoli ruszając gałką oczną, rozprowadzić kroplę po powierzchni oka.
8. Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz.

*O czym należy pamiętać stosując krople Hyal-Drop multi?*

- Krople Hyal-Drop multi nie zawierają konserwantów. Opatentowany mechanizm z pompką pozwala na używanie kropli 12 tygodni (3 miesiące) po otwarciu. Hyal-Drop multi nie należy używać po upływie terminu ważności.
- Nadwrażliwość występuje rzadko. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości, przerwać stosowanie kropli.
- Kropli Hyal-Drop multi nie należy używać w przypadku uszkodzenia pojemnika.

**Skład:**

Roztwór zawiera 2,4 mg/ml kwasu hialuronowego Nie zawiera konserwantów.