


# HydroNasin Ksylitol Zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok, 1 but. + 10 sasz.

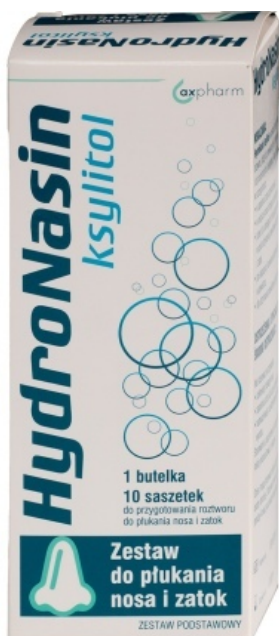

Cena: 20,37 zł

## Opis słownikowy

Postać	Zestaw
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AXPHARM SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### **Właściwości i zastosowanie:**

HydroNasin ksylitol to system do płukania nosa i zatok, który dzięki ciągłemu strumieniowi roztworu skutecznie przepłukuje, oczyszcza i łagodzi podrażnienia błon śluzowych nosa oraz zatok. Nawilża błony śluzowe, rozluźnia śluz, usuwa wszystkie rodzaje wydzielin, skrzepów i ogranicza gromadzenie czynników powodujących:

- zapalenie błony śluzowej nosa i zatok,
- katar infekcyjny,
- alergiczny nieżyt nosa.

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie systemu obronnego układu oddechowego (ruch migawkowy rzęsek i oczyszczanie błony śluzowej).

#### **Wskazania do stosowania:**

HydroNasin ksylitol w postaci przygotowanego roztworu, służy do prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, w szczególności:

- w zapaleniu zatok przynosowych,
- w nieżycie nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok,
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,
- dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Wyrób nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przypadkowe poknięcie roztworu HydroNasin ksylitol podczas płukania nosa i zatok nie jest szkodliwe.

Nie stosować w przypadku:

- całkowitej blokady nosa,
- zapalenia ucha lub uczucia zatkania ucha,
- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Stosowanie u pacjentów po przebytej operacji ucha należy skonsultować z lekarzem.

Dzieci mogą stosować zestaw tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Jedna butelka przeznaczona jest dla jednego użytkownika.