

Katarek Travel aspirator kataru 2w1, aspirator, 1 szt.

Cena: 46,52 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	DUNA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Katarek Travel 2w1 – aspirator do odkurzacza i ustny

Katarek Travel to urządzenie, dzięki któremu skutecznie, szybko i bezpiecznie odciągniesz zalegający w nosku dziecka katar.

To bardzo proste! Zaaplikuj do noska Malucha kilka kropli soli fizjologicznej, która rozrzedzi wydzielinę, a tym samym usprawni aspirację. Podłącz aspirator do rury odkurzacza i uruchom domowe urządzenie. Końcówkę przyłóż na kilka sekund do każdej z dziurek i... gotowe! Wykorzystaj pozostałą w ampułce sól fizjologiczną – ponownie wprowadź kilka kropli do noska, żeby nawilżyć jego błonę śluzową, a tym samym przyspieszyć regenerację.

Maluch ma czysty, drożny nosek, dzięki któremu swobodnie oddycha, jest spokojny i w końcu może zasnąć czy zjeść bez problemu. Aspirację możesz powtarzać tyle razy w ciągu dnia, ile potrzebujesz.

Katarek Travel to nasza nowość i urządzenie typu 2w1, które umożliwia odciągnięcie dziecku kataru wszędzie tam, gdzie nie możesz zabrać odkurzacza.

Jeśli:

- nie chcesz rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu nawet gdy maluch ma lekki katar
- często podróżujesz samochodem, pociągiem czy komunikacją miejską
- nie chcesz rezygnować ze spotkania z przyjaciółką czy wizyty u dziadków pomimo lekkiego kataru malucha

- planujesz wakacje i czeka Cię długa podróż

Katarek Travel 2w1 będzie doskonałym wyborem!

Aspirator ustny Katarek – kiedy się sprawdzi?

Gdy nie masz możliwości użycia odkurzacza, możesz w prosty sposób zmienić końcówkę i wykorzystać siłę swoich płuc, by pozbyć się nieprzyjemnej wydzieliny z noska malucha. Katar zbiera się w pojemniczku w komorze aspiratora, którą bez problemu rozkręcisz, by wyczyścić urządzenie.

Pamiętaj jednak, że aspirację ustną powinnaś wykonywać tylko wtedy, gdy nie masz możliwości podłączenia odkurzacza lub w przypadku, gdy katar jest lekki, wodnisty, a zegar wybił akurat drugą w nocy i nie chcesz obudzić domowników czy sąsiadów. Ustny aspirator doskonale spisze się na spacerze lub podczas podróży samochodem, tramwajem, pociągiem czy samolotem.

Planujesz wakacje marzeń? Nie zapomnij o Katarku Travel! W nagłych przypadkach użyjesz końcówki do aspiracji ustnej, a gdy (oby nie!) katar nie odpuści, odkurzacz podłączysz w hotelu. Dodatkowo, Katarek Travel 2w1 zapakowany jest do pojemnej i poręcznej kosmetyczki podróżnej. Możesz do niej wsadzić również kilka ampulek soli fizjologicznej czy maść nawilżającą do nosa i paczkę chusteczek higienicznych!

Ustna wersja aspiratora spisze się genialnie również podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia. Bardzo często w nosku dziecka (zwłaszcza po nocy) znajdują się drobne paproszki czy zaschnięte grudki. Teraz możesz szybko i skutecznie jej pozbyć się zanieczyszczeń, dzięki czemu Twój Maluszek będzie mógł swobodnie oddychać.

Pamiętaj – czysty, drożny nosek to doskonałe samopoczucie, zdrowy sen, apetyt i chęć do zabawy!

Po każdej aspiracji wyczyść urządzenie Katarek Ustny pod bieżącą, ciepłą wodą, używając dołączonej do zestawu szczoteczki.

W zestawie Katarek Travel 2w1 znajdziesz:

- aspirator kataru z rozkręcaną komorą i szczoteczkę
- 2 końcówki do noska
- Końcówkę do odkurzacza
- Końcówkę do aspiracji ustnej
- Kosmetyczkę podróżną – opakowanie