

Kelo-Cote żel Silikonowy na blizny, żel, 6g



Cena: 90,81 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	EKOPHARM
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania:

- Plaster silikonowy w żelu do leczenia blizn o opatentowanej formule, unikalnej technologii przylegania do skóry SILICLEAR COMPLEX.
- Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi w leczeniu wszystkich rodzajów blizn: pooperacyjnych, poparzeniowych, pourazowych, potrądzikowych, po cesarskim cięciu.
- Zapobiega nieprawidłowemu bliznowaceniu do postaci blizny przerostej i bliznowca.

Opis działania składników aktywnych

Udowodniono naukowo w wielu badaniach że unikalna formuła silikonu SILICLEAR COMPLEX w preparatach Kelo-cote® spłascza, zmiękcza oraz wygładza blizny, zmniejsza stopień odbarwienia skóry w miejscu blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu.

Kelo-cote® innowacyjny silikonowy żel wpływa na normalizację produkcji kolagenu.

Kelo-cote® żel łatwo nakłada się na wszystkie obszary skóry, w tym okolice stawów i zgięć oraz szybko wysycha pozostawiając niewidoczny, przepuszczający powietrze „film”, stanowiący ochronę przeciw bakteriom oraz promieniom UV.

Kelo-cote® plaster silikonowy w żelu do leczenia blizn.
pojemności – 6g . 15g. 60g.

Nowość biotechnologii – plaster silikonowy w żelu.

Polimery dwutlenku krzemu wysychając łączą się krzyżowo tworząc cienki plaster samo przyklejający się do skóry.

Opatrunek zapewnia okluzję, utrzymuje się na skórze przez 12 godzin po czym złuszcza się wraz z naskórkiem.

Plaster silikonowy w żelu do leczenia blizn o opatentowanej formule, unikalnej technologii przylegania do skóry SILICLEAR COMPLEX. Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi w leczeniu wszystkich rodzajów blizn: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych, potrądzikowych, po cesarskim cięciu. Zapobiega nieprawidłowemu bliznowaceniu do postaci blizny przerostej i bliznowca.

Kelo-cote®:

- Zmiękcza, wygładza i spłaszcza powierzchnię blizny;
- Zmniejsza stopień odbarwienia blizny;
- Łagodzi swędzenie i uczucie dyskomfortu;
- Wpływa na normalizację produkcji kolagenu.

Kelo-cote® łatwo nakłada się na wszystkie obszary skóry, w tym okolice stawów i zgięć oraz szybko wysycha pozostawiając niewidoczny, przepuszczający powietrze „film”, stanowiący ochronę przeciw bakteriom oraz negatywnym bodźcom środowiska zewnętrznego.

Główną istotą działania silikonu na bliznę jest tworzenie opatrunku silikonowego a tylko 24 godzinny kontakt silikonu z blizną zapewniający okluzję daje efekt terapeutyczny.

Cechy Kelo-cote®:

- przezroczysty,
- szybko i samo wysychający,
- utrzymuje odpowiednią wilgotność skóry,
- innowacyjny żel silikonowy do stosowania miejscowego na skórę,
- posiada unikalne właściwości w porównaniu z innymi preparatami.

Skład:

Polisiloksan, dwutlenek krzemu.

Opatentowana formuła silikonu: (US patent 5,741 509)

Sposób użycia:

1. Powierzchnię na którą ma być nałożony żel należy umyć i wysuszyć.
2. Nałożyć bardzo cienką warstwę żelu i pozostawić do wyschnięcia przez 4-5 minuty.
3. Nakładać 2 razy dziennie rano i wieczorem – najlepsze efekty lecznicze uzyskujemy zapewniając 24-godzinny kontakt żelu z blizną.
4. Prosimy o staranne zakręcanie tuby po użyciu aby uniknąć strat produktu, żel ma właściwości samo-wysychające,

Kelo-cote® można stosować u kobiet w ciąży.

Kelo-cote® można stosować u dzieci i u osób z wrażliwą skórą.

Kelo-cote® można stosować pod odzież uciskową, należy zwiększyć ilość aplikacji do 3/4 w ciągu doby.

Na wyschnięty żel można nakładać kremy z filtrami UV oraz makijaż, opatrunek jest wodoodporny.

Zaleca się używanie preparatu Kelo-cote® przez trzy miesiące.

Stosując preparat dłużej można uzyskać lepsze wyniki leczenia.

Zalecane środki ostrożności:

- Nie można stosować preparatu Kelo-cote®
 - na otwarte lub świeże rany na błony śluzowe (nosa, jamy ustnej) lub zbyt blisko oczu.
 - na nałożone wcześniej preparaty zawierające inne leki.
- Kelo-cote® żel należy stosować tylko na czystą, suchą skórę
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Zalety stosowania żelu Kelo-cote®:

- łatwy w aplikacji
- samo wysychający (4-5 minut)
- nie powoduje maceracji
- bezbolesny, niedrażniący

- bezbarwny, bez zapachu, przezroczysty
- można nakładać kosmetyki po wyschnięciu Kelo-cote®
- zapewnia elastyczną ochronę
- idealny do blizn o nieregularnej powierzchni

Kelo-cote® został opracowany by pomóc w leczeniu blizn i przywrócić naturalny wygląd skóry po zagojeniu się rany.

Na rynku polskim istnieje wiele żeli określanych „silikonowymi”, które to środki zawierają znikome ilości silikonu 4-14%, (silikon jest w nich jedynie substancją bazową) lub silikon w nich użyty nie ma właściwości terapeutycznych (nie wysycha, jest lepki, nie tworzy opatrunku)

Używanie przez producentów badań dotyczących zastosowania silikonu w leczeniu blizn, jako potwierdzenie skuteczności działania ich produktów jest całkowicie bezpodstawne.

Więcej informacji – badania kliniczne na: www.kelo-cote.pl

Producent:

Advanced Bio-Technologies, Inc.
4830 West Kennedy Blvd. Suite 600 Tampa, Florida 33609 USA

Produkt Medyczny Klasy I, CE
Autoryzowany przedstawiciel UE
Alliance Pharma S.r.l. Viale Restelli 5, 20124 Milano Italy.
European Medical Device (6/14/93) 93/42/EEC – Annex V
Opatentowana formuła silikonu: (US patent 5,741 509)

Autoryzowany wyłączny dystrybutor w Polsce:

EKOPHARM POLSKA Staszica 38, 05-220 Zielonka k. Warszawy INFOLINIA 600 41 7585